



# FICHA TECNICA

<b>Designación</b>	<b>Turboprint A – R&amp;S</b>																					
<b>Referencia</b>	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"><i>Turboprint A</i></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1-973</td> </tr> </table>		<i>Turboprint A</i>	1-973																		
<i>Turboprint A</i>																						
1-973																						
<b>Visual</b>																						
<b>Descripción</b>	Alginato de fraguado rápido, Tipo I, Clase A, libre de polvo.																					
<b>Indicación</b>	Alginato de alta definición para impresiones dentales.																					
<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Absorción de agua rápida, fácil de mezclar.</li> <li>- Volumen homogéneo, superficie lisa y dura.</li> <li>- Tixotrópico.</li> <li>- Memoria de impresiones: 48h (deformación mínima).</li> </ul>																					
<b>Datas técnicas</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tiempo de mezcla</td> <td style="text-align: center;">30 s</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tiempo total de trabajo</td> <td style="text-align: center;">1 min 10 s</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tiempo tomado en la boca</td> <td style="text-align: center;">1 min</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tiempo total de exposición</td> <td style="text-align: center;">2 min 10 s</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aroma</td> <td style="text-align: center;">Menta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Color</td> <td style="text-align: center;">Azul</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Memoria elástica</td> <td style="text-align: center;">98 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Deformación permanente</td> <td style="text-align: center;">11,7 %</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Fuerza compresiva</td> <td style="text-align: center;">1,2 MPa</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Dosificación de la mezcla</td> <td style="text-align: center;">18 g de polvo + 36 ml de agua</td> </tr> </table>		Tiempo de mezcla	30 s	Tiempo total de trabajo	1 min 10 s	Tiempo tomado en la boca	1 min	Tiempo total de exposición	2 min 10 s	Aroma	Menta	Color	Azul	Memoria elástica	98 %	Deformación permanente	11,7 %	Fuerza compresiva	1,2 MPa	Dosificación de la mezcla	18 g de polvo + 36 ml de agua
Tiempo de mezcla	30 s																					
Tiempo total de trabajo	1 min 10 s																					
Tiempo tomado en la boca	1 min																					
Tiempo total de exposición	2 min 10 s																					
Aroma	Menta																					
Color	Azul																					
Memoria elástica	98 %																					
Deformación permanente	11,7 %																					
Fuerza compresiva	1,2 MPa																					
Dosificación de la mezcla	18 g de polvo + 36 ml de agua																					
<b>Esperanza de vida</b>	2 anos																					
<b>Embalaje</b>	Bolsita de 500 g																					
<b>Embalaje / Almacenamiento</b>	Cerrar herméticamente después de su uso, debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperaturas entre 5°C y 27°C (41°F y 80°F). No usar después de la fecha de caducidad.																					
<b>Informaciones Legales</b>	Dispositivo médico de Clase I según la Directiva Europea 93/42 / CEE Marcado CE																					

Version 1.0  
 Mis à jour 24/05/2018 par Kimberline SOHAHI