

CFPM
www.rs-dental-products.com/

91%
de pareceres
favoráveis

Descrizione

O **TURBOPRINT CLASS A R&S** é um alginato elástico, isento de pó e de endurecimento rápido. O seu uso é adequado a um vasto leque de procedimentos de impressão na prática odontológica de rotina. O tempo total desde o início da mistura até à remoção da boca é de 2 minutos e 40 segundos ; o tempo intraoral é de 1 minuto. Partículas de dimensão padronizada asseguraram uma rápida absorção da água e uma superfície compacta, mais suave e uniforme. A moldagem da impressão pode ser adiada por várias horas, sem comprometer a sua precisão, caso seja armazenada numa embalagem selada. O produto tem aroma a menta e cor azul. O **TURBOPRINT CLASS A R&S** está disponível numa embalagem única de 500 g. As embalagens quando devidamente fechadas têm um prazo de validade de quatro anos. Vinte e nove consultores avaliaram o **TURBOPRINT CLASS A R&S**, efetuando 361 impressões num período de seis semanas. Este produto recebeu um parecer clínico favorável de 91%.

Recomendações clínicas

- A limpeza do tecido mole é mais fácil se a pele e a língua estiverem húmidas, do que muito secas.

"BOM DESEMPENHO NA MOLDEIRA DE IMPRESSÃO."

Comentários dos consultores

- "É resistente à rotura."
- "O sabor a menta não é demasiado forte."
- "Gostaria que o endurecimento fosse mais rápido."

Características do produto

- Um 95 % dos consultores avaliaram que **TURBOPRINT CLASS A R&S** é "tão bom como" ou "melhor que" o alginato que usam actualmente. Consideram que fazia pouco pó, era fácil de verter, misturar e de transferir à moldeira.
- Alguns dos assistentes dentários comentaram que o alginato parecia granulado quando se misturava mas que não afetava o resultado final.
- Os pacientes consideram que o sabor é leve e o aroma muito agradável.
- Oferece uma alta qualidade de detalhes nas impressões e nos modelos vazios.
- 67 % dos consultores compraria o **TURBOPRINT CLASS A R&S** e 87% recomendaria aos seus colegas.

