

CFPM
www.rs-dental-products.com/

91%
de pareceres
favoráveis

Descrizione

O **TURBOPRINT CLASS A R&S** é um alginato elástico, isento de pó e de endurecimento rápido. O seu uso é adequado a um vasto leque de procedimentos de impressão na prática odontológica de rotina. O tempo total desde o início da mistura até à remoção da boca é de 2 minutos e 40 segundos ; o tempo intraoral é de 1 minuto. Partículas de dimensão padronizada asseguraram uma rápida absorção da água e uma superfície compacta, mais suave e uniforme. A moldagem da impressão pode ser adiada por várias horas, sem comprometer a sua precisão, caso seja armazenada numa embalagem selada. O produto tem aroma a menta e cor azul. O **TURBOPRINT CLASS A R&S** está disponível numa embalagem única de 500 g. As embalagens quando devidamente fechadas têm um prazo de validade de quatro anos. Vinte e nove consultores avaliaram o **TURBOPRINT CLASS A R&S**, efetuando 361 impressões num período de seis semanas. Este produto recebeu um parecer clínico favorável de 91%.

Recomendações clínicas

- A limpeza do tecido mole é mais fácil se a pele e a língua estiverem húmidas, do que muito secas.

"BOM DESEMPENHO NA MOLDEIRA DE IMPRESSÃO."

Comentários dos consultores

- "É resistente à rotura."
- "O sabor a menta não é demasiado forte."
- "Gostaria que o endurecimento fosse mais rápido."

Características do produto

- El 95 % de los consultores evaluaron que **TURBOPRINT CLASS A R&S** es "tan bueno como" o "mejor que" el alginato que usan en la actualidad. Encontraron que creaba poco polvo, era fácil de verter, mezclar y transferir a la cubeta.
- Algunos de los asistentes dentales comentaron que el alginato parecía granulado mientras se mezclaba pero que esto no afectaba al resultado final.
- Los pacientes hallaron que el leve sabor y su aroma eran agradables.
- Ofrece una alta calidad de detalles en las impresiones y en los modelos vaciados.
- El 67 % de los consultores comprarían **TURBOPRINT CLASS A R&S** y el 87% lo recomendarían a sus colegas.

