

APECO Meditex France

3 Allée des Acacias

93430 Villetaneuse

Tél : 01.42.35.15.95

Fax : 01.42.35.21.42

Mail : meditex.france@free.fr

Fiche Technique et les instruction de stérilisation

Nous vous informons que vous utilisez un très bon matériel fabriqué et de qualité en instrumentation dentaire.

Nous utilisons toujours de l'inox **GRADE AISI 410** pour les matériel non coupants.

Nous recommandons de stériliser ces matériels en AUTOCLAVE par la méthode appropriée.

- 1) Placer les instruments dans le compartiment et fermer la porte.
- 2) Evacuer le plus d'air possible.
- 3) Programmer la pression à 105 Kpa et lorsque le thermomètre indique la température de 134 °C, la stérilisation débute.
- 4) Laisser la stérilisation se poursuivre durant 18 minutes et laisser dans l'autoclave
- 5) Laisser refroidir puis laisser sécher les instruments pendant 15 minutes dans l'autoclave.
- 6) Le dentiste doit nettoyer les traces de sang avec les solutions recommandées avant de les réutiliser les instruments.

Fabricant :
Fidem Entreprises Sialkot, Pakistan

SARL APECO MEDITEX FRANCE
3 Allée des Acacias
93430 Villetaneus