

FICHA TECNICA

BONTEMPI INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

na aceção da directiva CEE 47/2007 sobre os dispositivos médicos

CND

Registo Repertório

L150702

639087/R

LIGA UTILIZADA:

- Aço inoxidável austenítico (AISI 300 series)
- Aço inoxidável martensítico (AISI série 400/420/440 / 440C)

REGRAS APLICÁVEIS AO PRODUTO:

CEE Directiva 47/2007, de acordo com a regra do Anexo IX do produto foi classificado na categoria I.

VALIDAÇÃO CLÍNICA:

Revistas, Publicações literatura médica científica e cartas de médicos dão provas de validações clínicas.

EMBALAGEM:

O produto encontra-se embalado em sacos de plástico transparentes, não-estéril. Este saco oferece uma protecção adequada e permite que o produto chegue ao cliente final em condições de higiene seguras.

AVISOS:

Armazenar em local seco. Cada instrumento BONTEMPI é destinado a pessoal qualificado e o uso para o qual foi concebido e implementado. Os instrumentos usados, danificados, oxidados não deve ser utilizados, uma vez que não estão em condições de desempenhar a sua função.

De notar que alguns tipos de danos (corrosão, pontos de ferrugem e afins) são transmitidos para os instrumentos intactos por contato.

INSTRUÇÕES DE USO:

O equipamento é entregue em condição não estéril e devem ser verificados, limpos, lavados e esterilizados antes de cada utilização e após cada intervenção.

Remova todos os depósitos de resíduos orgânicos e outras substâncias corrosivas que utiliza produtos específicos, em concentrações e dentro do prazo especificado pelo fabricante. Deverá haver verificações periódicas do bom funcionamento do equipamento de esterilização, autoclave ou outros sistemas utilizados por vós.

Para a esterilização a vapor (autoclave) não usar temperaturas superiores a 134 ° C.

O não cumprimento destas regras básicas podem causar danos irreparáveis para o instrumento e anulará qualquer garantia substituição ou direito de regresso contra o Bmed Srl.

A garantia não cobre a manutenção geral (por exemplo, afiar, substituição placas Mola / Parafuso / TC).

Os instrumentos Bontempi estão sujeitos a directiva EC 47/2007, pelo que devem estar de acordo com os regulamentos as autoridades regionais.



Bandabnehmezange
Band remover
Pinza per rimuovere le bande
Alicates para quitar bandas
Pinces à détacher les bagues

ADERER
DP-36T
135 mm

BONTEMPI
CHIRURGISCHE INSTRUMENTE

BMED Srl - Via Mincio, 166
47842 San Giovanni in Marignano RN
C.F. e P.Iva 04006860409

T +39 0541 1799990
F +39 0541 1794330
bmedsurgery.it / info@bmedsurgery.it