

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TAVOLO 30.E0023
INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR TABLE 30.E0023

Tabella Specifiche Elementi (contenuto della confezione) / Box Content:

Codice/Code	Nome/Description	Quantità/Quantity
1	Vassoio / Base	1
2	Piastra / Frame	1
3	Struttura ad H / "H" Structure	1
4	Piede a T con ruote / "T" Foot with wheels	2
5	Pomello in plastica / Plastic Handle	4

Istruzioni / Instructions:

1. Appoggiare la piastra (2) sul pavimento con gli incastri verso l'alto; / Lay the frame (2) on the floor keeping the holes in upper position;
2. Infilare la struttura ad H (3) negli incastri e avvitare due pomelli (5) negli appositi fori di fissaggio; / Insert the "H" structure (3) in the holes and screw the two plastic handles (5);
3. Infilare i piedi a T completi di ruote (4) con i fori per i pomelli rivolti all'interno e avvitare i due pomelli (5) rimanenti nella confezione; / Insert the "T" feet (4) complete with wheels in the side holes and screw the two remaining plastic handles (5);
4. Girare la struttura e appoggiarla sulle ruote; / Turn the structure upside down and lay it on the wheels;
5. Appoggiare sulla piastra (2) il vassoio (1); / Lay the base (1) on the frame(2);

