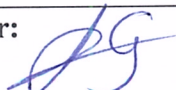
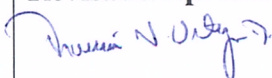
 Laboratorios Clarben S.A.	TÍTULO:	OCTOBON LC	CÓDIGO:	FT-SGC017.01
	FECHA DE EMISIÓN:	29/DIC/2016	REEMPLAZA:	R1
			No. PÁG.:	1 de 3

CONTENIDO

1. CARACTERISTICAS
2. FINALIDAD
3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE
4. PRESENTACIÓN
5. NÚMERO DE REFERENCIA
6. MODO DE EMPLEO
7. ADVERTENCIAS
8. IMAGEN

Realizado por:  Firma/fecha 29/12/2016	Revisado/Aprobado por:  Firma/fecha 29/12/2016
--	---

Queda prohibida la divulgación, utilización, reproducción total o parcial de su contenido sin previa autorización formal expedido por **Laboratorios Clarben, S.A.**

1. CARACTERÍSTICAS

OCTOBOND LC es un agente de adhesión monocomponente basado en un sistema monómero de metacrilato y un catalizador fotosensitivo en un solvente de acetona.

2. FINALIDAD

Fijar composites y copómeros tanto del esmalte como de la dentina así como inlays/onlays, carillas, coronas, porcelanas y metal cerámicas.

3. CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE

Producto sanitario Clase IIA.

4. PRESENTACIÓN

Octobond LC
Bote de 5 ml

5. NÚMERO DE REFERENCIA

Ref: 04-039

6. MODO DE EMPLEO

- Preparar la cavidad como de costumbre.
- Cepillar con una pasta profiláctica (PROFEX).
- Aplicar una capa de ácido grabador (OCTACID) en toda la superficie.
- Mantener el ácido durante 15 segundos.
- Enjuague con agua y secar con aire.
- Agitar el bote antes de cada uso.
- Presione delicadamente en la botella y dispense una pequeña cantidad de adhesivo.
- Con un pincel bien saturado aplicar 2-3 capas de adhesivo sobre la superficie. Secar durante 10-20 segundos.
- Si la superficie no queda lustrosa, aplicar capas adicionales de adhesivo y secar.
- Fotopolimerizar durante 10-20 segundos.
- Aplicar una capa de composite (Octofill u Octofill Flow) en la cavidad y finalizar la restauración.

7. ADVERTENCIAS

- Al ser bastante fluido, no forzar la botella.
- En caso de contacto con tejidos, ojos, piel u otras áreas, enjuagar de inmediato con abundante agua.
- Almacenar bien cerrado in lugar fresco, oscuro y seco.
- Proteger de la luz solar.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para más información consultar la Hoja de seguridad.

Visado DT:



8. IMAGEN



