

BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

INSTRUNET INIBSA UNIVERSAL

Formulación trienzimática

Producto concentrado 1L/ 100L diluido

Eficaz en solo 5 minutos



Instrunet Inibsa Universal es un desinfectante y detergente concentrado, formulado especialmente para la desinfección de instrumental en la clínica odontológica.



 **inibsa**
DENTAL

CE
0459

BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

Características

Formulación trienzimática:

Proteasa: reduce las proteínas en aminoácidos.

Lipasa – actúa sobre las grasas.

Amilasa – destruye los glúcidos.

No contiene cloruros

Dilución muy económica al 1%: 1 L de Instrunet Inibsa Universal = 100L de solución lista para usar.

Eficaz en solo 5 minutos – activo sobre todos los virus con envoltura. ⁽¹⁾

Ideal para su uso en cubeta de ultrasonidos.

pH 7,2 cuando está diluido, compatible con una amplia gama de materiales.

Modo de empleo

Antes de utilizar ponerse guantes apropiados.

1. Diluir Instrunet Inibsa Universal al 1%: 20 ml por cada 2 litros de agua llenando el dosificador hasta el nivel deseado.

2. Verter el contenido en la cubeta de desinfección.

3. Sumergir totalmente los instrumentos en la solución, tapar la cubeta y dejar actuar durante 5 minutos.

4. Retirar los instrumentos de la solución y comprobar la ausencia de suciedad aparente.

5. Cepillar en caso necesario.

6. Enjuagar abundantemente con agua potable para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica.

7. Secar los instrumentos y prepararlos para la esterilización.

Renovar la solución cuando este visiblemente sucia y como mínimo una vez al día.

Composición

Propionato de amonio cuaternario, digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes.

Precauciones de empleo

Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.

Almacenar entre +5°C y +35°C

Producto sanitario de clase IIb (Directiva 93/42/CEE modificada).

Propiedades Microbiológicas a 20°C

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
Bactericida	EN 13727, EN 14561 al 0.5%	5 minutos
	EN 13727, EN 14561 Activo frente a BMR al 0.5%	5 minutos
Levuricida	EN 13624, EN 14562 al 1%	5 minutos
Virucida	EN 14476 Activo frente a PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCU), Herpe virus, vaccinia virus, VIH-1	5 minutos

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición

Referencia: 4911

(1) El Instituto Robert Koch recomienda el uso de desinfectantes que proclamen una actividad virucida limitada para interrumpir la cadena de infección. Según este Instituto, una actividad virucida limitada (eficaz contra los virus con envoltura) corresponde a una actividad contra el virus vaccinia y el BVDV.

Fabricado por: Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68

Distribuido por: Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 08185 Lliçà de Vall - Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

