

BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

INSTRUNET INIBSA ASPIRACIÓN

No produce espuma

Triple acción: limpiador,
desincrustante y desinfectante

Producto Concentrado
1 L = 50L diluido



Instrunet Inibsa Aspiración es un desinfectante, desincrustador y limpiador concentrado para todo tipo de sistemas de aspiración en entornos dentales. No produce espuma.

 **inibsa**
DENTAL



CE
0459

BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

Características

No espumante.

Triple acción: limpiador, desincrustante y desinfectante.

Dilución muy económica al 2%: 1 L de concentrado = 50 L de solución lista para usar.

Eficaz en 15 minutos – amplio espectro de acción.

No es considerado peligroso para el medio ambiente cuando está diluido al 2%.

Modo de empleo

Antes de utilizar ponerse guantes apropiados.

1. Al final del día, preparar 2 litros de solución diluida al 2% (40 ml para 2 litros de agua).

2. Llenar el dosificador hasta el indicador de 20 ml y repetir la operación.

3. Verter el contenido en un envase apropiado.

4. Sumergir en el líquido las conexiones de entrada y salida de líquido.

5. Accionar los mecanismos de aspiración.

6. Dejar actuar durante 15 minutos como mínimo. Se puede dejar actuar la solución durante toda la noche.

Cualquier exposición prolongada a temperaturas altas (>35°C) puede producir una modificación del color sin alterar la capacidad antimicrobiana.

Composición

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente secuestrante, colorante y excipientes.

Precauciones de empleo

Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.

Almacenar entre +5°C y +35°C.

Producto sanitario de clase IIa [Directiva 93/42/CEE modificada].

Propiedades Microbiológicas a 20°C

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
Bactericida	EN 13727, EN 14561 al 1%	15 minutos
Levuricida	EN 13624, EN 14562 al 1%	15 minutos
Tuberculicida	EN 14348, EN 14563 al 1,6%	60 minutos
Virucida	EN 14476 Activo frente a BVDV (virus modelo HCV) al 0,50%, Herpesvirus al 1%, <i>Vaccinia virus</i> al 2%, HIV-1 al 1%.	5 minutos

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

Referencia: 4915

Fabricado por: Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68

Distribuido por: Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 08185 Lliçà de Vall - Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:

