

# BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

# INSTRUNET INIBSA SPRAY

Desinfectante de superficies  
listo para usar sin aldehidos

Eficaz en 30 segundos

Agradable olor a limón



Instrunet Inibsa Spray ofrece una desinfección rápida de las superficies del box con un amplio espectro de eficacias. Está indicado para la desinfección rápida de superficies de material médico resistente al alcohol (p.e. el sillón del dentista).



 **inibsa**  
DENTAL

CE  
0459

# BIOSEGURIDAD

Protegemos tu clínica

## Características

Producto listo para usar.  
Agradable olor a limón.  
Amplio espectro de eficacia.  
pH a 20°C: aprox 5,5.

## Modo de empleo

Antes de utilizar, verificar que la zona a tratar esté limpia y sea compatible con el alcohol.

1. Pulverizar uniformemente y en cantidad suficiente sobre la zona a tratar.
2. Tiempo de contacto: 30 segundos mínimo (ampliar hasta 5 minutos en función de la eficacia perseguida)

## Composición

Solución hidroalcohólica (Etanol 55%), propionato de amonio cuaternario y perfume.

## Precauciones de empleo

Peligroso – respete las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Antes de utilizar el producto, lea la etiqueta y la información correspondiente.

Almacenar entre +5°C y +25°C.

Producto sanitario de clase IIa (Directiva 93/42/CEE modificada).

## Propiedades Microbiológicas a 20°C

Eficacia	Normas	Tiempo contacto
<b>Bactericida</b>	EN 1276, EN 13727, EN 13697.1	30 segundos
<b>Micobactericida</b>	EN 14348	5 minutos
<b>Levuricida</b>	EN 1650, EN 13624, EN 13697	30 segundos
<b>Tuberculicida</b>	EN 14348	30 segundos
<b>Fungicida</b>	EN 1650, EN 13624, EN 13697.	5 minutos
<b>Virucida</b>	EN 14476 Activo frente a BVDV (virus modelo HCV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus, Adenovirus, EN 14476 Activo frente a Norovirus	30 segundos 5 minutos

La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

**Referencia: 4912**

**Fabricado por:** Laboratoires ANIOS - Pavé du Moulin - 59260 LILLE - HELLEMES Tél : +33 3 20 67 67 67 Fax : +33 3 20 67 67 68

**Distribuido por:** Inibsa Dental, S.L.U. - Ctra. Sabadell a Granollers, Km. 14,5 08185 Lliçà de Vall - Barcelona (España) T +34 938 609 500 F +34 938 439 695

Síguenos en:



[www.inibsadental.com](http://www.inibsadental.com)

