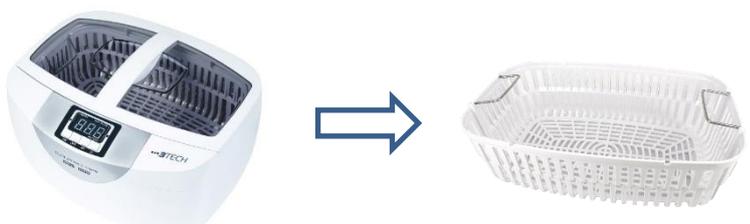


Designación	ULTRASONIC CLEANER USC-2.25							
Referencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNATION</th> <th>REFERENCE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ULTRASONIC CLEANER USC-2.25L</td> <td>3112773</td> </tr> <tr> <td>PANIER PLASTIQUE USC-2.5L</td> <td>3124962</td> </tr> </tbody> </table>		DESIGNATION	REFERENCE	ULTRASONIC CLEANER USC-2.25L	3112773	PANIER PLASTIQUE USC-2.5L	3124962
	DESIGNATION	REFERENCE						
	ULTRASONIC CLEANER USC-2.25L	3112773						
PANIER PLASTIQUE USC-2.5L	3124962							
Visuales								
Descripción	Cubeta de ultrasonidos para la limpieza y desinfección de los instrumentos y de todo el instrumental pequeño (limas, pinzas para díques, fresas, etc.).							
Características & datos técnicos	<p><u>Ultrasonico:</u> Potente: 160 W Frecuencia: 42 kHz Temperatura de calentamiento: 65°C Selección digital de programas entre 5 ciclos Duración ajustable: 45 minutos Capacidad: de 0,6 hasta 2,5l Peso: 2,5 kg Dimensiones externas (alto x ancho x fondo): 17,5 x 28 x 22 cm Dimensiones de la cuba (alto x ancho x fondo): 8 x 25 x 15 cm Tapa removible</p> <p><u>Cesta:</u> Material: cesta de plástico, asas de acero Peso de la cesta: 108,532 g Dimensiones de la cesta (alto x ancho x fondo): 24,8 x 14,4 x 7,8 cm</p>							
Indicaciones de uso	<p>No sumerja la unidad en agua u otros líquidos. Para evitar daños causados por la alta temperatura, por favor apague la limpiadora durante al menos 3 minutos y cambie el agua usada después de tres ciclos de trabajo de 480s.</p> <p>El aparato puede desconectarse o no poder desconectarse cuando está sometido a interferencias electromagnéticas que producen rápidas interrupciones/cargas eléctricas. Si esto ocurre, siga las instrucciones descritas en el manual para volver a encender la unidad.</p> <p>No utilice el aparato si no hay suficiente agua en el depósito de limpieza.</p>							
Informaciones legales	Clase directiva: SIN CLASE							