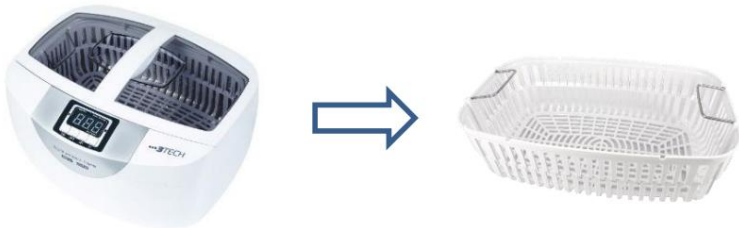


Designação	LIMPADOR ULTRASSÔNICO USC-2.25							
Referências	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESIGNAÇÃO</th> <th>REFERÊNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LIMPADOR ULTRASSÔNICO USC-2.25L</td> <td>3112773</td> </tr> <tr> <td>CESTO PLÁSTICO USC-2,5L</td> <td>3124962</td> </tr> </tbody> </table>	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	LIMPADOR ULTRASSÔNICO USC-2.25L	3112773	CESTO PLÁSTICO USC-2,5L	3124962	
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA							
LIMPADOR ULTRASSÔNICO USC-2.25L	3112773							
CESTO PLÁSTICO USC-2,5L	3124962							
visuais								
Descrição	Tanque ultrassônico para limpeza e desinfecção de instrumentos e todos os pequenos instrumentos (limas, pinças dam, brocas, etc.).							
Características e dados técnicos	<p><u>Ultrassônico:</u> Potência: 160W Frequência: 42kHz Temperatura de aquecimento: 65°C Seleção digital de programas entre 5 ciclos Duração ajustável: 45 minutos Capacidade: de 0,6 a 2,5l Peso: 2,5 kg Dimensões externas (altura x largura x profundidade): 17,5 x 28 x 22 cm Dimensões da cuba (altura x largura x profundidade): 8 x 25 x 15 cm tampa removível</p> <p><u>A estrada:</u> Material: cesta de plástico, alças de aço Peso da cesta: 108,532 g Dimensões da cesta (A x L x P): 24,8 x 14,4 x 7,8 cm</p>							
Indicações de uso	<p>Não mergulhe a unidade em água ou outros líquidos. Para evitar danos causados por altas temperaturas, desligue o aspirador por pelo menos 3 minutos e troque a água usada após três ciclos de trabalho de 480s.</p> <p>O aparelho pode ou não desligar quando sujeito a interferência eletromagnética que causa interrupções/cargas elétricas rápidas. Se isso ocorrer, siga as instruções do manual para ligar novamente a unidade.</p> <p>Não use o aparelho se não houver água suficiente no tanque de limpeza.</p>							
informação legal	Classe diretiva: SEM CLASSE							