



BlancONE® CLICK



Descripción

BlancONE® CLICK es un tratamiento de **blanqueamiento** a base de Peróxido de Carbamida al 16%, **muy fácil de aplicar**, que no necesita de protección gingival, gracias al bajo porcentaje de peróxido y al breve tiempo de contacto. Por sus características es un tratamiento de blanqueamiento ideal para realizar después de una higiene dental.

BlancONE® CLICK es de venta exclusiva en clínicas dentales.

Características

RÁPIDO

- **BlancONE® CLICK** requiere de un solo ciclo de **10 minutos** con fotoactivación. Incluso después de la higiene oral.

DELICADO

- **BlancONE® CLICK** **no deshidrata el esmalte** y puede ser aplicado tanto en presencia de leve sangrado como de cuellos descubiertos.

FÁCIL DE APLICAR

- **BlancONE® CLICK** no requiere de protector gingival para mayor comodidad del paciente y del profesional.

Tratamiento

1. Quitar los tapones de la jeringa blanqueadora y del gel activador para mezclarlas utilizando el conector luer-lock. Pasar el producto de una jeringa a otra para mezclar correctamente. Repetir la operación hasta que los 2 geles se mezclen completamente (aproximadamente 10 veces).
2. Aplicar el gel sobre la superficie de todos los dientes que se deseen blanquear.
3. Fotoactivar el gel con luz azul y activar durante 10 minutos. Una vez activado el gel, quitar los restos con un algodón y/o aspirar.

| Tipología Tratamientos | Principio Activo | Protocolo | Eficacia Típica | Frecuencia Aconsejada |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Clínica | Peróxido Carbamida 16% | 1 ciclo de 10 minutos | 4 a 5 tonos | 2 a 4 veces por año |

Referencias

- Código 5001_Blancone CLICK (Caja de 10 unidades)