



DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

Dilución:
0,5%

Descripción	Dento-Viractis 95 ASPIGERM se recomienda para limpiar y desinfectar de sistemas de aspiración , escupideras y separadores de amalgama.	
Áreas de aplicación	Para su uso en mangueras de aspiración y saliva quirúrgicas	
Características	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpieza óptima y sin espuma ✓ Desincrustante derivado del limón ✓ Fragancia cítrica ✓ Sin EDTA, sin CMR, sin fosfatos 	
Presentación comercial	La botella de 1 litro con jarra medidora Bote de 5 litros Accesorios: Bomba dosificadora de 10 ml para sistema de 2 L Bomba dosificadora de 15 ml para sistema de 3 L Bomba dosificadora de 20 ml para sistema de 4 L	

Actividad antimicrobiana				Tiempo de contacto, condiciones
Bactericida	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5%	15 min
	EN 14561		2%	
Levuricidio	EN 13624	Candida albicans	0,5%	15 min
Virucida	Según la norma EN 14476	Virus del herpes simple tipo 1	0,5%	5 min
	Según la norma EN 14476	PRV (virus modelo HBV)	0,25%	1 min

DENTO-VIRACTIS



DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

DENTO-VIRACTIS

Composición	<ul style="list-style-type: none">- Menos del 5% de tensioactivos no iónicos- Perfume que incluye limoneno- Desinfectante: Etanol (n°CAS 64-17-5), Alquilo (C12-16) cloruro de dimetilbencilamonio (n°CAS 6842485-1), Propan 2ol (n°CAS 67-63-0)
Precauciones	Contiene D-LIMONENO. Puede provocar una reacción alérgica.
Instrucciones de uso	Preparación de la solución al 0,5%: 1. Diluir 5ml por litro de agua (es decir, 20ml por 4L de agua). Utilizar: 1. Hacer circular la solución por cada tubo de aspiración 2. Tiempo de contacto: 15 minutos. 3. Aclarar
Frases de riesgo	<ul style="list-style-type: none">- R36: Irrita los ojos.- R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Frases de seguridad	<ul style="list-style-type: none">- S26: En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico y consultar a un especialista.- S57: Utilizar un recipiente adecuado para evitar la contaminación ambiental.- S60: Eliminar el producto y su envase como residuos peligrosos.- S61: Evitar la liberación al medio ambiente. Consulte las instrucciones especiales/hoja de datos de seguridad.
Etiquetado	

Marcado CE0459 obtenido en 2019. Clase IIa DM. Versión del formulario 2.0. de 09/2021

Distribuí por :
CADENCE
2 bis, chemin du loup
93290 Tremblay-en-France
FRANCE



SODEL - ISO 9001/13485
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE.
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50
www.sodel-sa.eu - www.alkapharm.fr