



DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

Dilución:
0,5%

DENTO-VIRACTIS

Descripción	<p>Dento-Viractis 95 ASPIGERM está recomendado para la limpieza y la desinfección de los sistemas de aspiración y de los recuperadores de amalgama.</p> 
Áreas de aplicación	Para usar sobre los flexible de aspiración quirúrgica y de saliva.
Características	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Limpieza óptima y sin formación de espuma ✓ Desincrustante derivado de limón ✓ Citrus perfume ✓ Sin EDTA, CMR, o fosfato
Presentación comercial	<p>La botella de 1 litro con dosificador graduado La botella de 5 litros</p> <p>Accesorios: La pompa dosificadora de 10 ml para sistema de 2 L La pompa dosificadora de 15 ml para sistema de 3 L La pompa dosificadora de 20 ml para sistema de 4 L</p>

Actividad antimicrobiana			Concentración	Tiempo de contacto
Bactericida	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae	0,5%	15 min
	EN 14561		2%	15 min
Levuricida	EN 13624	Candida albicans	0,5%	15 min
Virucida	Segundo EN 14476	Herpès virus simplex tipo 1	0,25%	5 min
		PRV (virus modelo HBV)	0,5%	1 min



DENTO-VIRACTIS ASPIGERM 95

DENTO-VIRACTIS

Composición	Tensioactivos catiónicos y no iónicos, agente desincrustante, perfume.
Precauciones	Contiene del D-LIMONENO. Puede causar una reacción alérgica.
Instrucciones de uso	Preparación de la solución a 0.5%: 1. Diluir 5ml por litro de agua (o 20ml en 4l de agua). Utilización: 1. Hacer circular la solución por cada tubo de aspiración. 2. Tiempo de contacto: 15 minutos. 3. Aclarar.

Frases de riesgo:

- R36: Irrita los ojos.
- R50: Muy tóxico para los organismos acuáticos.

Frases de seguridad:

- S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S57: Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.
- S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
- S61: Evítese su liberación al medio ambiente.

Etiquetaje:



Marcado CE0120 obtenido en 2010. Versión de la ficha: 1.0

CE **HYGITECH**
www.hygitech.com
25, rue Bleue
75009 PARIS - FRANCE
0 1 2 0 Tel: +33 (0)1 48 01 32 89