

MICROAPLICADOR

PT

I. Indicações

Os microaplicadores podem ser utilizados para a aplicação de:

- Ataque ácido
- Adesivo
- Aglutinante
- Revestimento de cavidades
- Verniz de fluor protetor
- Agente hemostático
- Selante de fóssulas e fissuras, etc.

II. Características do produto

Os microaplicadores estão disponíveis em formato cónico e esférico. O aplicador está dividido em três secções: cabeça do aplicador, haste do aplicador e cauda quebrável. A haste do aplicador é feita de PP, sendo por isso confortável e elástica, e permite dobrar a cabeça do aplicador em qualquer posição angular. A cabeça do aplicador é feita de fio de nylon de alta qualidade.

III. Instruções de uso





1. Retire o aplicador e segure na haste mantendo uma posição confortável. Coloque a cabeça do aplicador no recipiente da solução e retire a solução.
2. Para facilitar a utilização do aplicador, dobre a cabeça do aplicador em todos os ângulos necessários de acordo com a posição de revestimento.
3. Pode escolher um aplicador cónico ou esférico, dependendo das necessidades.

IV. Método de manutenção e armazenamento

1. O produto deve ser armazenado num local seco e ventilado, a temperatura ambiente, com uma humidade relativa não superior a 80% e onde não fique exposto a gases corrosivos.
2. Evite expor o produto a luz solar direta.
3. Evite que o produto sofra extrusão ou danos durante o armazenamento.
4. Mantenha a embalagem íntegra e evite danos por pressão no produto.

V. Contraindicações

Até ao momento, não foram identificadas contra-indicações.

	Marcação CE		Número de lote
	Uso único		Fabricante
	Data de validade		Manter virado para cima
	Consultar as instruções de uso		Referência
RxOnly	Apenas para uso com receita medica		Dispositivo médico