




# DENTO-VIRACTIS SURFACES 77

Listo para usar

<p><b>Descripción</b></p>	<p>Dento-Viractis 77 se recomienda para uso de <b>limpieza y desinfección por medio de la limpieza en húmedo.</b></p> 
<p><b>Áreas de aplicación</b></p>	<p>Para uso en dispositivos médicos y dentales reutilizables, no estériles y no sumergibles.</p>
<p><b>Características</b></p>	<p><b>Limpiador desinfectante de amplio espectro de actividad</b>          ✓ Fácil de usar por medio de un paño húmedo          ✓ Fragancia agradable</p>
<p><b>Presentación comercial</b></p>	<p>Botella de 1 litro con pulverizador          Bote de 5 litros          Caja de 120 toallitas          Recambio de 100 toallitas</p>

DENTO-VIRACTIS

Actividad antimicrobiana			Tiempo de contacto
<p><b>Bactericida</b></p>	<p>EN 1276</p>	<p>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</p>	<p>5 min</p>
	<p>EN 13697</p>	<p>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</p>	
	<p>EN 13727</p>	<p>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,</p>	<p>1 min</p>
	<p>EN 14561</p>	<p>Escherichia coli</p>	<p>5 min</p>
	<p>EN 16615*</p>		
<p><b>Fungicida</b></p>	<p>EN 1650</p>	<p>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)</p>	<p>5 min</p>
	<p>EN 13697</p>		
	<p>EN 16615*</p>	<p>Candida albicans</p>	
	<p>EN 13624</p>	<p>Candida albicans / Aspergillus (niger)</p>	<p>1 min / 5 min</p>
	<p>EN 14562</p>	<p>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (niger)</p>	<p>5 min</p>

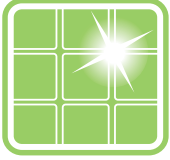

# DENTO-VIRACTIS SURFACES 77

## DENTO-VIRACTIS

Actividad antimicrobiana			Tiempo de contacto
Virucida	EN 14476	Norovirus	30 sec
	EN 14476	Adenovirus, Vacuna***	5 min
		Poliovirus	3 min
		Rotavirus	5 min
		VIH	30 sec
EN 16777	Vacuna***, Adenovirus, Norovirus	5 min	
Esporicidio	NFT 72-281**	Bacillus subtilis	5 min
	EN 17126	Clostridium difcil	15 min

\* Protocolo específico para el uso de toallitas.

\*\* Norma específica para su uso en pulverizadores (con o sin acción mecánica)



\*\*\* El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus con envoltura presentados en el EN 14476+A2 (2019) y EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB) (VHB); virus de la hepatitis C (VHC); virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); Herpesviridae (virus del herpes); Coronavirus; virus de la gripe, la rabia, la rubeola y el sarampión; ...

<b>Composición</b>	Preparación líquida y toallita presaturada, TP2/TP4, ETANOL n°CAS: 64-17-5 a 620g/kg, N-( 3-AMINOPROPYL) -NDODECYLPROPANE-1,3-DIAMINE n°CAS : 2372-82-9 a 1,5g/kg.
<b>Instrucciones de uso</b>	<p><b>Utilizar como spray:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pulverizar de forma que se cubra la superficie a tratar (14mg/cm<sup>2</sup> según NF T 72-281) o sobre una tela no tejida limpia.</li><li>2. Limpiar a fondo la superficie a tratar.</li><li>3. Dejar actuar el producto durante 5 minutos (15 minutos para C. difficile). No aclarar (excepto las superficies en contacto con alimentos).</li><li>4. Cambie el soporte no tejido para cada equipo.</li></ol> <p><b>Uso de toallitas: Limpiar bien la superficie a tratar.</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dejar actuar el producto durante 5 minutos (15 minutos para C. difficile). No aclarar (excepto las superficies en contacto con alimentos).</li><li>2. Cambiar las toallitas por cada pieza del equipo.</li><li>3. Cierre bien la caja después de usarla.</li></ol>



# DENTO-VIRACTIS SURFACES 77

# DENTO-VIRACTIS

<b>Precauciones</b>	<p><b>PELIGRO.</b> Contiene D-LIMONENO. Puede producir una reacción alérgica. Líquido y vapores altamente inflamables. Provoca una grave irritación de los ojos. Nocivo para los organismos acuáticos, causa efectos adversos a largo plazo. Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fumar. Mantener el envase bien cerrado. Evitar su liberación al medio ambiente. Utilizar protección para los ojos.</p> <p><b>EN CASO DE ENTRADA EN LOS OJOS:</b> Aclarar con precaución con agua durante varios minutos. Retire las lentes de contacto si están presentes y son fácilmente extraíbles. Continúe enjuagando. Si la irritación de los ojos persiste: buscar atención médica. Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase fresco. Eliminar el contenido/ contenedor como residuo peligroso.</p>
<b>Etiquetado</b>	 

Obtención de la marca CE0459 en 2019. Hoja de datos versión 1.0 09/2021  
Uso profesional

Distribuí por :  
**CADENCE**  
2 bis, chemin du loup  
93290 Tremblay-en-France  
FRANCE



**SODEL - ISO 9001/13485**  
190 rue René Barthélemy, Pôle d'activités  
de l'Espérance, 14100 Lisieux, FRANCE.  
Tel: +33 (0)2 31 31 10 50  
[www.sodel-sa.eu](http://www.sodel-sa.eu) - [www.alkapharm.fr](http://www.alkapharm.fr)