

Normobiot Aspiración NF

Indicaciones:

Solución detergente desinfectante para la limpieza y desinfección diaria de los sistemas de aspiración dentales.

Características principales del producto:

- Producto concentrado.
- Formula no espumante.
- Amplio espectro de actividad antimicrobiana desde 5 minutos.
- Económico: dilución al 2% o sea 1L = 50L.
- Triple acción: limpia, desincrusta e desinfecta.
- Compatible con todos tipos de sistemas de aspiración.
- Puede ser utilizado para escupideras y separadores de amalgamas.
- Eficacia comprobada sobre biofilm según la norma ISO/TS 15883 – 5 : 2006.
- pH del producto puro: \approx 10.5.
- Color rojo / sin perfume.
- No clasificado como peligroso para el medio ambiente a la dosis de empleo.
- Sin sustancias CMR*, sin EDTA, NTA y aldehídos.

**Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

Composición:

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropano-1,3- diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente quelante, colorante y excipientes.

Propiedades microbiológicas a 20°C:

- Bactericida: EN 13727, EN 14561 – 15 minutos / 1%.
- Tuberculocida: EN 14348, EN 14563 – 60 minutos / 1,6%.
- Levaduricida: EN 13624, EN 14562 – 15 minutos / 1%.
- Activo según EN 14476 sobre BVDV (virus modelo VHC), Herpes virus, VIH-1, virus Vaccinia – 5 minutos / 2%.

Acondicionamiento:

- Envase de 1 litro.

Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

1. Diluir al 2% en una cuba para tener 2 litros de solución (40 ml para 2 litros de agua).
2. Aspirar la solución diluida.
3. Dejar que la solución actúe durante 15 minutos, como mínimo.
4. Enjuagar el sistema aspirando 1 litro de agua limpia, como mínimo.

Precauciones de uso:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIa, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +25°C.