

NORMBIOT TOALLITAS

Indicaciones:

Toallitas impregnadas de una solución limpiadora y desinfectante para la desinfección de dispositivos médicos en entornos dentales.

Características principales del producto:

- Toallitas listas para usar.
- Amplio espectro de acción antimicrobiana.
- No deja manchas ni residuos.
- Excelente compatibilidad materiales.
- Tamaño de la toallita: 130 mm x 190 mm.
- Olor mentol.
- pH de la solución de impregnación: ≈ 6 .
- Concentración de alcohol de la solución de impregnación: 41% v/v.
- No clasificado como peligroso para el medio ambiente (reglamento CE 1272/2008).
- Sin sustancias CMR*, sin EDTA, NTA y aldehídos.

**Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

Composición de la solución de impregnación:

Etanol, digluconato de clorhexidina, perfume de síntesis, excipientes.

Propiedades microbiológicas de la solución de impregnación:

- Bactericida: EN 1040, EN 13727+A1, EN 13697 – 1 minuto.
- Levaduricida: EN 1275, EN 13624, EN 13697 – 5 minutos.
- Activa sobre VIH-1, Herpesvirus – 1 minuto.
- Activa sobre VHB – 15 minutos.

Acondicionamiento:

- Bote de 120 toallitas.

Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

Producto listo para usar, para un solo uso. Antes de aplicarlo, verificar que la zona que se desee tratar sea compatible con el alcohol. Asegurarse de que los dispositivos que se vayan a desinfectar estén apagados.

1. Retirar la toallita del envase, tirando horizontalmente, y separarla con un tirón.
2. Aplicar la toallita sobre la zona previamente limpia que se vaya a desinfectar.
3. Dejar que la solución actúe 1 minuto, como mínimo. NO ENJUAGAR.
4. Después de cada uso, asegurarse de que el envase quede bien cerrado.

Precauciones:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIb, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +25°C.