

# NORMBIOT TRIENZIMÁTICO NF

## Indicaciones:

Solución detergente desinfectante tri-enzimática para la limpieza y desinfección de todos tipos de instrumentos dentales y quirúrgicos antes de su esterilización.

## Características principales del producto:

- Producto concentrado.
- Muy económico: dilución al 1% o sea 1L = 100L.
- Amplio espectro de actividad antimicrobiana en 5 minutos.
- Excelente poder detergente sobre material orgánico gracias a su complejo tri-enzimático.
- No corrosivo y compatible con una amplia gama de metales y materiales.
- Utilizable en cuba de ultrasonidos.
- Fórmula eficaz en agua dura y fresca.
- pH del producto puro:  $\approx 8,2$ .
- Color azul / olor limón.
- Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente a la dosis de empleo.
- Sin sustancias CMR\*, sin EDTA, NTA y aldehídos.

*\*Substancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción.*

## Composición:

Propionato de amonio cuaternario, digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes.

## Propiedades microbiológicas a 20 °C:

- Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 5 minutos / 0,5%.
- Bacterias multiresistentes: EN 13727 – 5 minutos / 0,5%.
- Levaduricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 5 minutos / 1%.
- Activo según EN 14476 sobre PRV (virus modelo VHB), BVDV (virus modelo VHC), Herpes virus, virus Vaccinia, VIH-1 – 5 minutos / 0,5%.

## Acondicionamiento:

- Envase de 1 litro.

## Protocolo de uso:

Asegurarse de llevar puestos los guantes adecuados.

1. Diluir al 1% en una cuba de inmersión (10 ml por litro de agua). Renovar la solución por lo menos una vez al día.
2. Sumergir los instrumentos en la solución y dejarlos 5 minutos como mínimo.
3. Sacar los instrumentos de la solución y revisarlos cuidadosamente. Cepillar los instrumentos si fuera necesario para quitar los residuos visibles.
4. Enjuagar los instrumentos bajo el agua corriente o sumergirlos en el agua.
5. Secar los instrumentos con una toalla de papel desechable y prepararlos para la esterilización.

## Precauciones de uso:

Peligroso – respetar las precauciones de uso. Dispositivo médico de clase IIb, CE 0459. Antes de utilizarlo, leer la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Conservar entre +5°C y +35°C.