

FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

FIXOFLÚOR BARNIZ DE FLÚOR

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Fluoruro sódico..... 5,00 g
Excipiente c.s 100 g

3. FORMA COSMÉTICA

Barniz de Flúor

4. INDICACIONES

Indicaciones

- Profilaxis de la caries.
- Desensibilización de los cuellos dentarios.

Posología y Normas para la correcta administración

Fixoflúor® es de uso específico por odontólogos, no debe ser utilizado para una automedicación del paciente. No debe ser ingerido.

Previamente en la clínica dental es necesario eliminar completamente la placa bacteriana. A continuación es aconsejable limpiar los dientes de la saliva que los cubre. Seguidamente extraer del tubo con la ayuda de una torunda de algodón, espátula u objeto similar una pequeña cantidad de Fixoflúor® y extender por todas las superficies del diente haciendo hincapié en las zonas oclusales, interproximales y gingivales formando una fina capa. Es recomendable aspirar el exceso de gel de la cavidad bucal.

El paciente puede cerrar la boca rápidamente después de su aplicación.

No se recomienda llevar a cabo aplicaciones a individuos que presenten el estómago vacío, especialmente a niños.

El paciente debe abstenerse de ingerir alimentos sólidos durante 4 horas, y de enjuagarse y cepillarse los dientes después de la aplicación.

El número de aplicaciones lo establece un odontólogo, y puede ser de una vez por semana durante un mes, o una vez cada 3 meses, 6 meses o un año según la susceptibilidad que tenga el paciente de padecer caries dental.

Tratamiento de los cuellos dentarios hipersensibles

El odontólogo establece la frecuencia de las aplicaciones. Se aconseja que sea 1 ó 2 días por semana durante un mes. Se puede administrar el gel de Fixoflúor® solo o en combinación con productos específicos desensibilizantes de Laboratorios KIN S.A.

Precauciones

Su uso tiene las limitaciones de los geles de flúor de alta concentración.
Mantener Fixoflúor® fuera del alcance de los niños.
No ingerir.



Interacciones con otras sustancias

Se debe evitar la acumulación de ion flúor, por ello el mismo día de la aplicación de Fixoflúor® no deben administrarse otros productos que contengan altas concentraciones de ion flúor ni mediante aplicación tópica ni oral.

5. ACTIVIDAD

Fixoflúor® es un gel de flúor con un marcado efecto preventivo de la caries. Gracias a sus buenas características fisicoquímicas se adhiere en la superficie dental, facilitando la penetración de flúor al interior del esmalte dental.

6. OTROS DATOS

Período de validez

Tres años.

Precauciones especiales de conservación

No almacenar en lugares cuya temperatura sea superior a 30 ° C.

Presentaciones

Tubo de 30 ml.

Registro

966-Dent.

Nombre y domicilio del titular

LABORATORIOS KIN, S.A.
Av. Diagonal, 200. E-08018 Barcelona – España
www.kin.es. e-mail kin@kin.es