

Indicaciones para el cuidado del sistema de aspiración con Orotol® plus & MD 555 cleaner

Desinfección diaria con Orotol® plus


Con el concentrado líquido Orotol® plus se tiene la solución ideal para la desinfección, desodorización, limpieza y cuidado simultáneos de todos los sistemas de aspiración y separadores de amalgama. La aplicación se realiza después de la finalización del tratamiento, en caso de uso intensivo 2 veces al día (a media jornada y a última hora).



Aspirar 2 litros de agua



Preparar una solución al 2%:
1 litro de agua + 20 ml Orotol plus

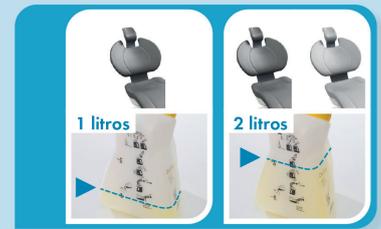

Por unidad de tratamiento:
1 litro de agua + 1 tapón de Orotol® plus (20 ml)
Para 2 unidades de tratamiento:
2 litro de agua + 2 tapas de Orotol® plus (40 ml)



Conectar tubos flexibles de aspiración, aspirar 1 litro de solución por unidad de tratamiento



Mínimo 250 ml de solución por escupidera



Permitir que actúe durante al menos 1 hora. Gama de efecto: Bactericida, levurocida, virucida limitado (virus con envoltura, incluyendo HBV, HCV, HIV y coronavirus), así como adenovirus y norovirus



Aspirar 2 litros de agua durante la reactivación

Limpieza semanal con MD 555 cleaner


MD 555 cleaner es su limpiador especial de sistemas de aspiración y separadores de amalgama. Tiene un alto poder de limpieza contra depósitos, incrustaciones y sedimentación. La aplicación se realiza 1 a 2 veces por semana (p.ej. martes y jueves), en caso de uso intensivo, una vez al día durante la pausa de mediodía.



Aspirar 2 litros de agua



Preparar una solución al 5%:
1 litro de agua + 50 ml MD 555 cleaner

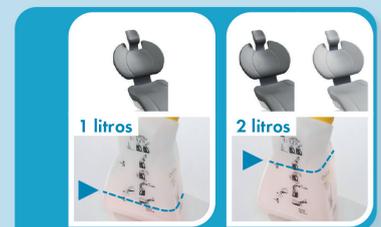

Por unidad de tratamiento:
1 litro de agua + 2,5 tapas de MD 555 cleaner (50 ml)
Para 2 unidades de tratamiento:
2 litro de agua + 5 tapas de MD 555 cleaner (100 ml)



Conectar tubos flexibles de aspiración, aspirar 2 o 1 litros de solución



Mínimo 250 ml de solución por escupidera



Permitir que actúe durante 30 a 120 minutos



Aspirar 2 litros de agua durante la reactivación