


BT Cool EASY
SISTEMA DE BRANQUEAMENTO
MANUAL DO UTILIZADOR



-
- Esta unidade tem de ser instalada por dentistas certificados e utilizada apenas por pessoal médico licenciado e formado ou profissionais de laboratório.
 -  Todas as instruções neste MANUAL DO UTILIZADOR têm de ser lidas por completo antes da instalação ou funcionamento.

ÍNDICE

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | APRESENTAÇÃO. | 2 |
| 2. | VANTAGENS. | 2 |
| 3. | CONSTITUIÇÃO e INSTALAÇÃO. | 2 |
| 4. | FUNCIONAMENTO. | 6 |
| 5. | MANUTENÇÃO. | 6 |
| 6. | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. | 7 |
| 7. | ESPECIFICAÇÕES e ACESSÓRIOS. | 7 |
| 8. | GARANTIA. | 8 |

1. APRESENTAÇÃO

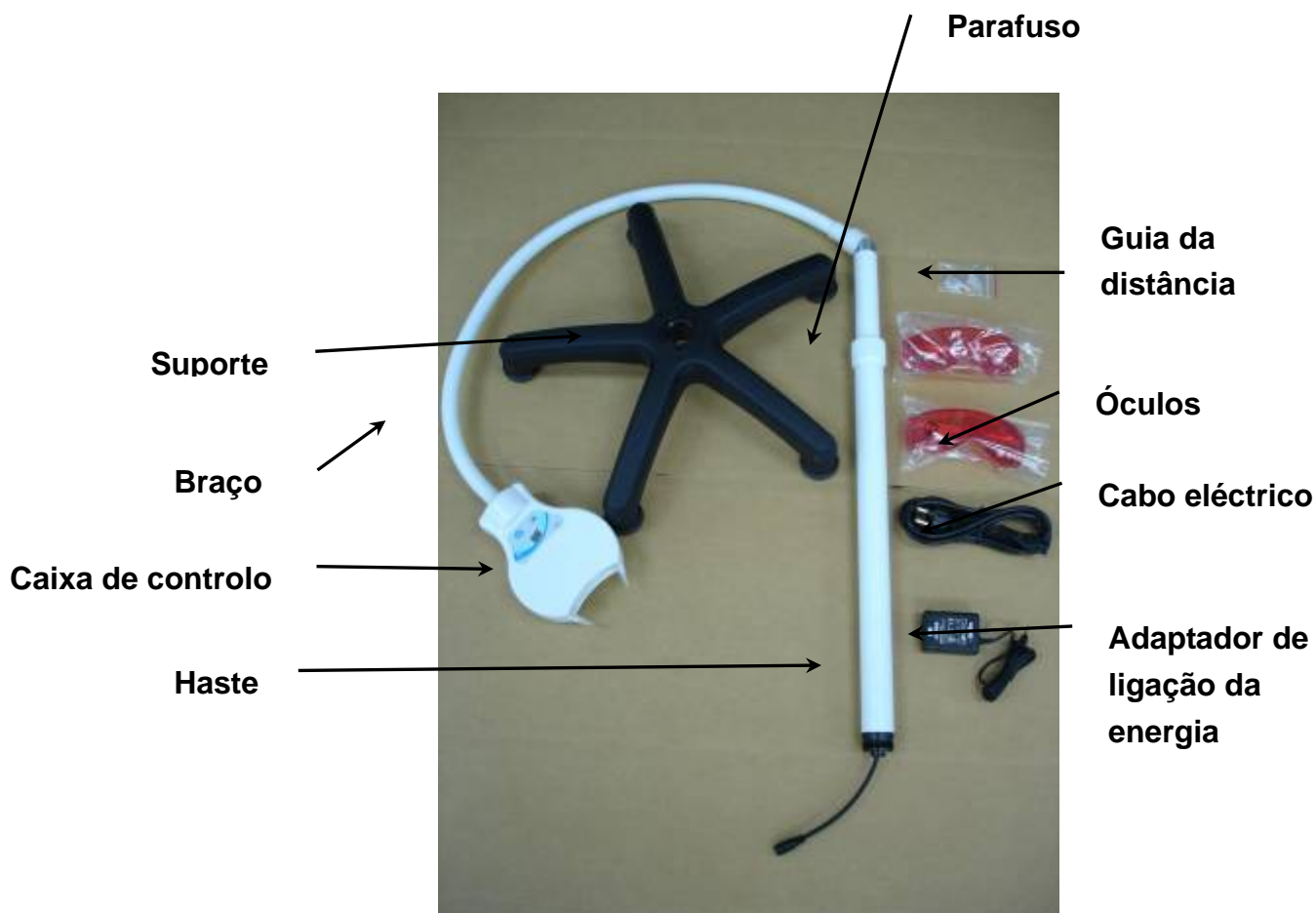
Esta unidade foi criada para o branqueamento dos dentes num consultório. Esta unidade tem de ser utilizada apenas por profissionais dentistas.

2. VANTAGENS




- 1》 **Fonte de iluminação LED:** Emite uma luz azul, potente, mas que não cria muito calor. Funcionamento calmo sem ventoinhas ruidosas.
- 2》 **Forma em arco:** Fornece um campo de branqueamento da boca quase completo.
- 3》 **Múltipla Selecção do Tempo:** 5, 10, 15, 20 e 25 minutos.
- 4》 **Braço giratório com controlo na ponta dos dedos:** Suaviza o funcionamento e a configuração da posição, arrastando e puxando.
- 5》 **Retenção da memória:** Tem uma configuração de memorização da última operação, para a utilização seguinte.
- 6》 **Design simples:** Pequeno e leve.
- 7》 **Fácil de instalar, de utilizar e de guardar.**

3. CONSTITUIÇÃO e INSTALAÇÃO

CONSTITUIÇÃO:



INSTALAÇÃO:

| IMAGEM | PROCESSO DE MONTAGEM |
|---|--|
|  | <p>1. Coloque o braço na haste verticalmente.</p> |
|  | <p>2. Segure bem o braço e rode a haste no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para apertar bem o braço, conforme a imagem.</p> |
|  | <p>3. Coloque o protector de borracha, conforme apresentado na imagem.</p> |

| IMAGEM | PROCESSO DE MONTAGEM |
|---|---|
|  | <p>4. Coloque a haste no suporte correctamente, conforme apresentado na imagem.</p> |
|  | <p>5. Aperte bem a haste no sentido dos ponteiros do relógio.</p> |
|  | <p>6. Complete a instalação da haste no suporte, conforme apresentado na imagem.</p> |

| IMAGEM | PROCESSO DE MONTAGEM |
|---|---|
|  | <p>7. Rode a rosca para ajustar o tamanho da haste: No sentido dos ponteiros do relógio: Aperta. No sentido inverso ao dos ponteiros do relógio: Desaperta.</p> |
|   | <p>8. Coloque correctamente o Guia da Distância, conforme apresentado na imagem.</p> |
|  | <p>9. Instalação completa.</p> |

4. FUNCIONAMENTO

- 1》 Ligue o cabo da alimentação à alimentação e ligue a alimentação à corrente eléctrica correcta (AC 100V~240V). Aparece “05” no ecrã.
- 2》 Prima “TIME” para seleccionar o tempo: 5, 10, 15, 20 e 25 minutos.
- 3》 Prima “START” para iniciar o funcionamento (o ponto ficará a piscar durante o funcionamento).
- 4》 Prima “PAUSE” para fazer uma pausa no funcionamento (o ponto permanece ligado durante a pausa) e prima de novo para continuar.
- 5》 Prima “RESET” para interromper o funcionamento, ou este termina quando acabar o tempo.
- 6》 Desligue a alimentação e mantenha a unidade devidamente arrumada após a utilização.
- 7》 Apoie bem a unidade e mova-a com cuidado muito lentamente, para prevenir danos na unidade ou lesões em pessoas se a plataforma de movimento ou de transporte ficar inclinada em 10° (ou mais). O equipamento tem de ser mantido nas posições especificadas apresentadas na imagem da instalação completa.

5. MANUTENÇÃO

- 1》 Mantenha o L.E.D. (área de iluminação) e o suporte afastados de líquidos, incluindo água.
- 2》 Mantenha a unidade limpa. Limpe o L.E.D. (área de iluminação) e o suporte apenas com um pano suave e seco, caso estes fiquem sujos.
- 3》 Não torça excessivamente a caixa de controlo, para prevenir danos da estrutura interna, caso a caixa de controlo esteja fixada pela cavilha no interior.
- 4》 Fixe o cabo eléctrico enquanto move ou transporta a unidade.
- 5》 Siga os requerimentos nacionais quanto à eliminação da unidade.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Os utilizadores podem simplesmente tratar das seguintes situações. Para qualquer outra situação que não esteja listada, por favor, contacte o seu revendedor imediatamente para uma verificação mais aprofundada. Qualquer reparação feita pelo utilizador pode piorar o estado do aparelho e dar origem a danos severos ou lesões.

| PROBLEMA | CAUSA POSSÍVEL | SOLUÇÃO |
|------------------------|--|---|
| “H5” aparece no ecrã. | A alimentação não é a correcta. | Use uma alimentação correcta com uma saída DC 5V. |
| O LCD não mostra nada. | <ol style="list-style-type: none">1. A alimentação não está bem ligada.2. Fusível sobrecarregado. | <ol style="list-style-type: none">1. Certifique-se de que a tomada, alimentação e o cabo da alimentação estão correctamente ligados.2. Retire a alimentação. Volte a ligar a alimentação passados 2 minutos. |

7. ESPECIFICAÇÕES e ACESSÓRIOS

1) ESPECIFICAÇÕES

| | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| FONTE DE ILUMINAÇÃO | : | LED azul |
| ESPECTRO | : | 430 ~ 490nm |
| ADAPTADOR DE LIGAÇÃO DA ENERGIA | | |
| ENTRADA | : | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| SAÍDA | : | DC 5V, 3A |
| COMPRIMENTO DO BRAÇO | : | 90cm |
| ALTURA | : | 140cm |
| PESO | : | 4,5 kg (líquidos) |

NOTA:

1. O melhor ambiente de funcionamento, transporte e armazenamento encontra-se nos:

| | | |
|-------------|---|------------|
| Temperatura | : | 0°C ~ 40°C |
| Humidade | : | 30% ~ 90%. |

2. A ficha da tomada é o sistema de ligação da alimentação do equipamento.

2) ACESSÓRIOS

CAIXA DE CONTROLO COM BRAÇO + HASTE + SUPORTE
ADAPTADOR DE LIGAÇÃO DA ENERGIA
ÓCULOS DE PROTECÇÃO
GUIA DE DISTÂNCIA

8. GARANTIA

- 1》 Este instrumento descrito neste manual foi completamente inspeccionado e encontra-se em conformidade com as especificações actuais do produto.**
- 2》 Este instrumento tem a garantia para o seu uso designado contra defeitos de origem de material e mão-de-obra durante um período de 12 meses a partir da data de compra.**
- 3》 Para prevenir atrasos no processamento de uma queixa ao abrigo da garantia, o cartão de registo deverá ser completado e devolvido na altura da compra.**
- 4》 Todos os termos da garantia estão sujeitos / baseiam-se no cartão da garantia fornecido com cada unidade.**