

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Designación | HYDROSOFT SOFT NORMAL SET R&S | |
| Referencia | <i>Putty Soft Normal Set</i> 3020750 | <i>Light Soft Normal Set</i> 3020749 |
| Visual | | |
| Descripción del producto | Silicona de adición de tipo vinilo Polisiloxano para impresiones de alta precisión. | |
| Indicaciones | Para impresiones de base en la técnica de un solo tiempo (doble mezcla) o como impresión principal en la técnica en dos tiempo (técnica "wash" o "impresión corregida ") | |
| Datos técnicos | Aspecto y color : | Pasta de dos componentes. PUTTY : Base: azul celeste - Catalizador: blanco LIGHT : Base: verde manzana - Catalizador: blanco |
| | Olor : | Inodoro |
| | Sabor : | Fresa salvaje |
| | Densidad relativa : | 1,61 g/cc |
| | Solubilidad en el agua : | insoluble |
| | Norma : | Iso 4823 – ADA 19 |
| | Tipo : | PUTTY : Tipo 0 Putty consistency LIGHT : Tipo 3 Light Bodied consistency |
| | Relación de mezcla | 1 : 1 |
| | Tiempo de mezcla : | 30 segundos |
| | Tiempo de trabajo : | 2 minutos |
| | Tiempo de toma en boca : | 3 minutos 30 |
| | Tiempo de toma total (a 23°C/73°F) : | 5 minutos 30 |
| | Memoria elástica : | PUTTY : > 99% LIGHT : > 99,5% |
| | Estabilidad dimensional 24h : | < 1,5% |
| | Retracción linear : | < 0,20% |
| | Reproducción de detalles : | 20 µm |
| | Dureza Shore A : | PUTTY : 60 ± 2 LIGHT : 45 ± 2 |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| | Duración de vida : | 3 años |
| Propiedad | <ul style="list-style-type: none"> - Textura suave y agradable a la mezcla. - Altamente hidrofílico, lo que permite una mayor precisión y disminuye el riesgo de defectos. - Alta resistencia a los agentes inorgánicos y los rayos UV. - La desinfección se realiza fácilmente sin el riesgo de alterar la impresión. - Capacidad para ejecutar múltiples modelos de la misma impresión, sin riesgo de deformación. - Desinserción fácil sin distorsión desgarro de la impresión. - Buena tixotropía del light. | |
| Acondicionamiento | <ul style="list-style-type: none"> - PUTTY : La caja de 450ml de base + 450ml de catalizador - LIGHT : La caja de 2 cartuchos de mezcla automática de 50 ml + 12 boquillas de mezcla | |
| Almacenamiento | <p>La impresiones deben ser conservadas a temperatura ambiente.</p> <p>Los productos deben ser conservados entre 5° y 27°C (41°-80°F).</p> | |
| Informaciones legales | Dispositivo médico de clase I. | |

Versión 1.0

Actualización 2014/12/19 por Palmier Jérôme