

SIMPLY

EASY



BEAUTY N HEALTH

Con doble función Supra y Perio



El aeropulido

Frescura
Control activo
de la enfermedad
periodontal

Simpli



Fiabilidad

Fácil de convertir

Prevención

Flexibilidad

Comodidad

Compatibilidad

SOLUCIÓN COMPLETA

4 boquillas para el control activo del progreso del tratamiento periodontal.

Dependiendo de sus necesidades clínicas, elija:

- Polvos "CLASSIC" a base de bicarbonato de sodio.
- Polvo "PEARL" a base de bicarbonato de calcio.
- Polvo "PERIO" a base de glicina.



es mucho más simple con

AIR N GO *easy*

ACTEON® ha creado la nueva generación de aeropulidores portátiles, AIR-N-GO® easy con funciones duales:

- Función "SUPRA" para pulido supragingival: pulido profiláctico.
- Función "PERIO" para pulido subgingival: mantenimiento, tratamientos de periodoncia y periimplantitis.

Este dispositivo médico alía la simplicidad con el rendimiento.

Descontaminación bacteriana Libertad de movimiento
Supra
Perio



UNA SOLA PIEZA DE MANO PARA CUBRIR UN COMPLETO RANGO DE CUIDADO Y TRATAMIENTOS

AIR-N-GO® easy combina funciones esenciales con fiabilidad para facilitar su trabajo diario:

- Raccord de conexión directo.
- Gran libertad de movimiento: rotación de 360°, tratamiento rápido y preciso de las áreas que requieren atención.
- Limpieza sencilla de la pieza de mano: las partes principales pueden desmontarse.

Potencia y rendimiento

Seguridad del paciente

Boquillas AIR-N-GO: Sus aliadas en la prevención y el tratamiento

Las boquillas, que resultan de las más avanzadas técnicas de modelado de dinámica de fluidos, proporcionan un spray continuo, preciso y controlado en cualquier contexto clínico.

En su práctica diaria estas boquillas AIR-N-GO® proporcionan potencia y eficiencia para la eliminación del biofilm supra y subgingival.

BOQUILLA AIR-N-GO® SUPRA *(dotación standard)*

- Herramienta adecuada para cualquier tratamiento profiláctico supragingival en combinación con AIR-N-GO® "CLASSIC" o polvos "PEARL".
- Garantiza un procedimiento rápido y eficaz para una mayor comodidad de trabajo.



Caso clínico Dr P. ROUAS (Francia)

BOQUILLA AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE *(opcional)*

- Consumo reducido de partículas finas del polvo AIR-N-GO® "PERIO" durante la fase de mantenimiento.
- Tratamiento de mucositis y retorno a una situación clínica saludable.
- Acción contra el progreso de la enfermedad periodontal.



Caso clínico Dr C. LIM (U.K.)



BOQUILLA AIR-N-GO® PERIO EASY *(kit PERIO easy opcional)*

- Diseño innovador en forma de “calzador” que proporciona una fácil inserción subgingival.
- Un activo real para el tratamiento subgingival no quirúrgico en dientes e implantes (bolsas periodontales de 3 a 8 mm).
- 5 segundos por cara es todo lo que necesita.



Caso clínico Dr C. LIM (U.K.)

BOQUILLA AIR-N-GO® PERIO *(opcional)*

- Uso subgingival para tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos (realización de perforaciones y colgajos abiertos).
- Potente spray lateral doble.
- Descontaminación de bolsas periodontales profundas (de 8 a 10 mm).



Caso clínico Dr A. PATEL (U.K.)

Polvos **air N GO** : soluciones personalizadas para sus necesidades clínicas

Los polvos AIR-N-GO® han sido diseñados y estudiados especialmente para producir un tratamiento efectivo y suave con todas las superficies tratadas. Estos polvos son compatibles con la pieza de mano AIR-N-GO® easy y no requiere ningún cambio de instrumento.

Polvos AIR-N-GO® "CLASSIC" a base de bicarbonato de sodio ($\approx 76 \mu\text{m}$)

- Completa gama de polvos supragingivales que responden a las preferencias de sus pacientes.
- Limpieza escrupulosa con resultados instantáneos.
- Eliminación de manchas y placa bacteriana, incluso en áreas de difícil acceso.
- Mejor aceptación del tratamiento: menos sangrado y menos dolor en el paciente.

FRESCOR 100% NATURAL



5 sabores frescos basados en aromas naturales o aceites esenciales:
Neutro, Cola, Frambuesa, Menta y Limón.


COMPETENCIA




Partículas estratificadas con geometría agresiva (x1000).



El esmalte tratado muestra numerosos rasguños (x300).

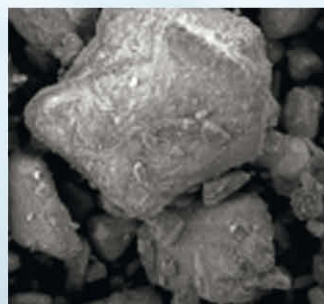

Partículas con geometría suavizada (x1000).

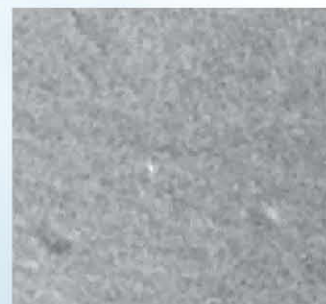


Esmalte tratado: superficie preservada sin impactos ni rasguños (x300).

Polvo AIR-N-GO® "PEARL" basado en carbonato de calcio natural ($\approx 55 \mu\text{m}$)

- Pulido supragingival ultraactivo y protección de tejidos frágiles.
- Reducción de la acidez del pH causado por inflamación tisular; retorno a una flora bucal clínicamente saludable.
- Restauración del brillo perlado natural del esmalte dental.
- Limpieza rápida de manchas difíciles y composites con total seguridad.

Incluso los pacientes más sensibles con gingivitis avanzada se beneficiarán del tratamiento proporcionado con "PEARL".

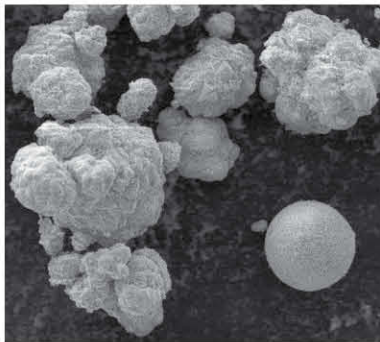

AIR-N-GO® "PEARL" (x1000)

Fuente: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) S.E.M. photos

ALTO RENDIMIENTO




Polvo AIR-N-GO® «PERIO» basado en glicina natural ($\approx 25 \mu\text{m}$)

- Uso exclusivo para tratamientos subgingivales como complemento de la terapia inicial.
- Bajo poder de abrasión para preservar las superficies tratadas (dientes e implantes) y las zonas anatómicas más frágiles.
- Previene la progresión del biofilm subgingival.

TERAPIA SUBGINGIVAL EN PROFUNDIDAD

Propiedades únicas con múltiples ventajas:

- Eliminación de placa: durante el mantenimiento periodontal en superficies radiculares expuestas, sin erosionarlas.
- Reducción de la carga bacteriana en las bolsas periodontales.

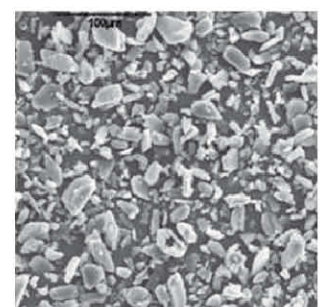








AIR-N-GO® "PERIO" (x1000)

Fuente: ICMCB CNRS (Institute of Condensed Matter Chemistry - French National Centre for Scientific Research) S.E.M. photos



GO SUPRA

Nombre de la boquilla	Polvos	Indicaciones
 AIR-N-GO® EASY SUPRA 120° Dotación standard.	 "CLASSIC" A base de bicarbonato de sodio. Tamaño medio de partícula 76 µm. SABORES: Limón, Menta, Frambuesa, Cola y Neutro.	Acabado después del detartraje, preparación para el blanqueamiento, limpieza de áreas interproximales, fisuras y resquicios, preparación de la superficie dental antes del grabado, limpieza de brackets, eliminación de biofilm supragingival, placa, manchas y residuos temporales de cemento.
	 "PEARL" A base de carbonato de calcio. Tamaño medio de partícula 55 µm. SABOR: Neutro.	
 AIR-N-GO® PERIO EASY Kit PERIO EASY, opcional	 "PERIO" A base de glicina. Tamaño medio de partícula 25µm. SABOR: Neutro.	Eliminación del biofilm subgingival, tratamiento periodontal y periimplantitis. Bolsas de 3 a 8 mm.
 AIR-N-GO® PERIO Opcional		Tratamiento periodontal y periimplantitis Bolsas de 8 a 10 mm.
 AIR-N-GO® PERIO MAINTENANCE Opcional		Mantenimiento periodontal Bolsas hasta 4 mm.

GO PERIO

Dientes e Implantes

Para obtener más información acerca de las buenas prácticas y el uso del AIR-N-GO® easy, consulte nuestro canal **YouTube**:



DOTACIONES

Standard

AIR-N-GO® easy: 1 pieza de mano AIR-N-GO® easy con adaptador según referencia (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1 boquilla SUPRA de 120°, 1 kit intro de polvo "CLASSIC" de 10 sobres multisabor y 2 sobres de polvo "PEARL", 1 kit de AIR-N-GO® easy maintenance (jeringa de grasa de silicona, cepillos aplicadores de grasa de silicona, juntas de recambio, jeringa, cánula y sondas de limpieza).

Opcional

Kit PERIO easy: Boquilla AIR-N-GO® PERIO easy y un frasco de 160 gr de polvo de glicina AIR-N-GO® "PERIO".

Boquilla AIR-N-GO® PERIO: Se suministra sola.

Boquilla AIR-N-GO® PERIO Maintenance: Se suministra sola.

*KaVo, Bien-Air, W&H, Sirona y Midwest son marcas registradas.