

**Protocol REVERSO SILVER (em retratamento )**



Após abrir a câmara e localizar todos os canais, preencha a cavidade de acesso com hipoclorito de sódio.




Utilize o seu instrumento REVERSO SILVER (ou reverso blue) 25 em contacto com a guta, exercendo uma leve pressão apical. Quando o instrumento entrar na guta-percha, desça alguns mm e retire.



Enxague abundantemente.



Retome o seu instrumento, coloque-o em contacto com a guta e avance alguns mm.

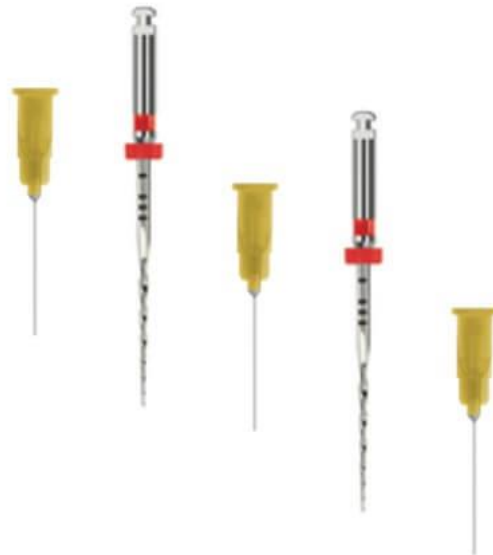

Enxague e recomece até ao comprimento de trabalho.

Dispositivos médicos de Classe IIa. Marcação CE 0197. Organismo de certificação TUV Rheinland. Representante europeu: Wellkang Ltd. Suite B, 29 Harley Street London, W1G 9QR, England, UNITED KINGDOM.

Representante europeu: Wellkang Limited The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND.