

Reprocesamiento de REVERSO SILVER



Después de abrir la cámara pulpar y localizar todos los canales, llene la cavidad de acceso con hipoclorito de sodio.




Utilice su instrumento REVERSO SILVER 25 (o reverso blue) en contacto con una ligera presión apical. Cuando el instrumento se enganche en la gutapercha, baje unos pocos mm y, retírelo.



Enjuague abundantemente.



Tome su instrumento, póngalo en contacto con la gutapercha y avance unos milímetros.

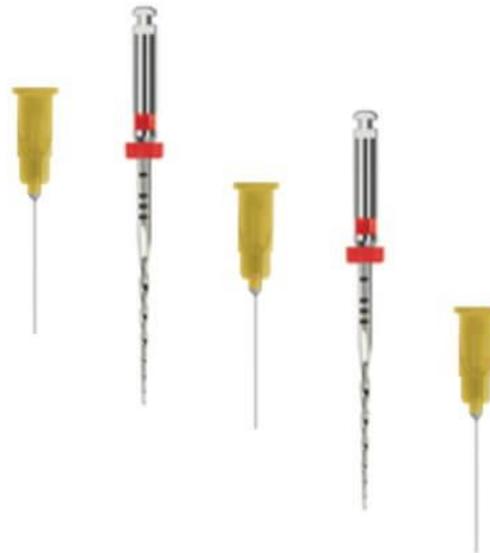

Enjuague y repita hasta la longitud de trabajo.

Dispositivos médicos de clase IIa. Marcado CE 0197. Organismo notificador TÜV Rheinland.
Representante europeo: Wellkang Limited The black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, IRELAND.
Representante europeo: Wellkang Ltd. Suite B, 29 Harley Street Londres, W1G 9QR, Inglaterra,
REINO UNIDO.