



Protocolo EASY-FILE FLEX GLIDER


Con EASY-FILE FLEX:

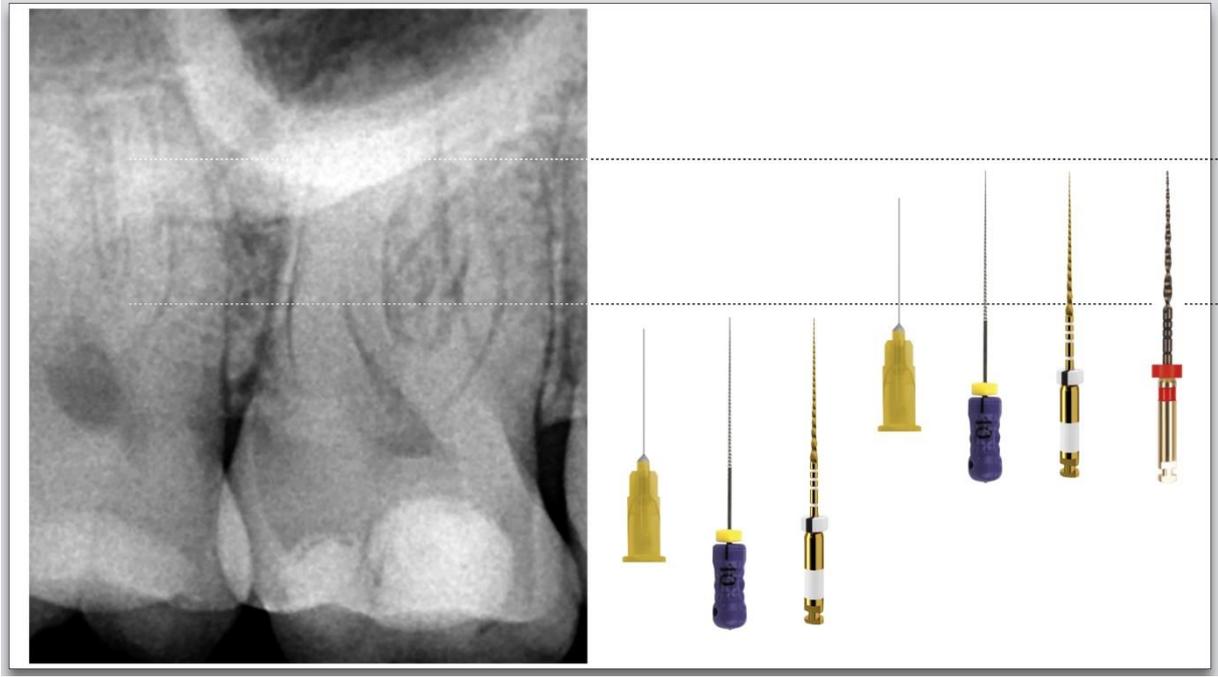

Con REVERSO BLUE:

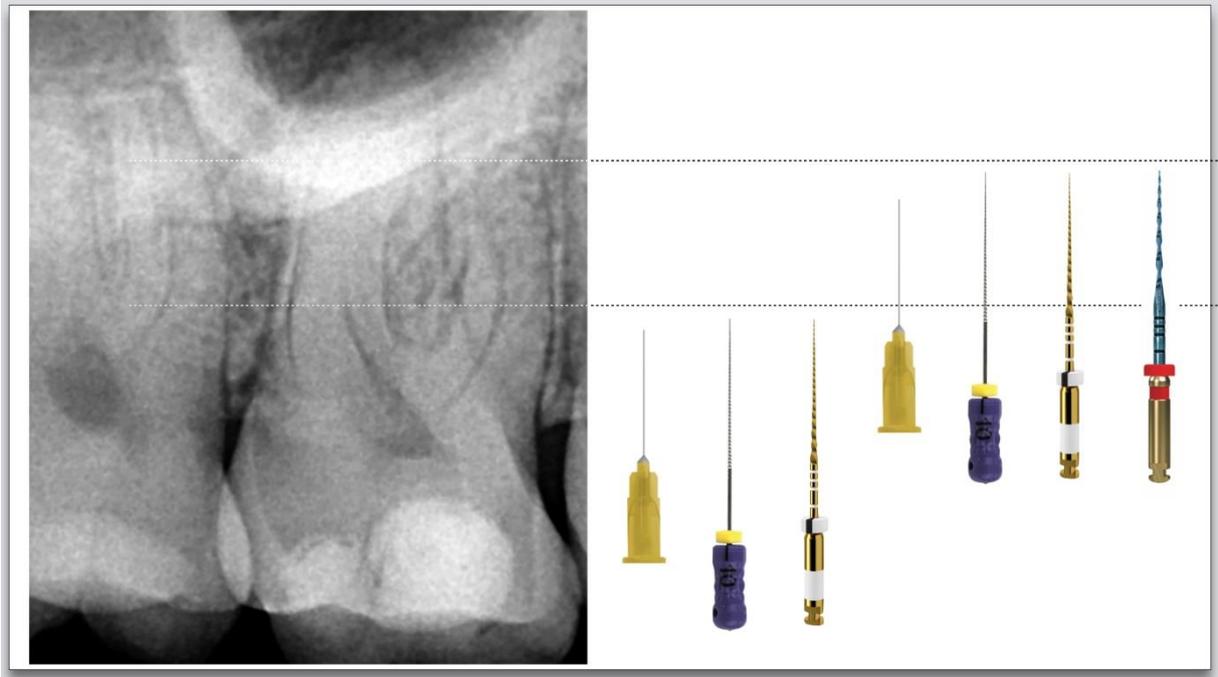

Con REVERSO SILVER:

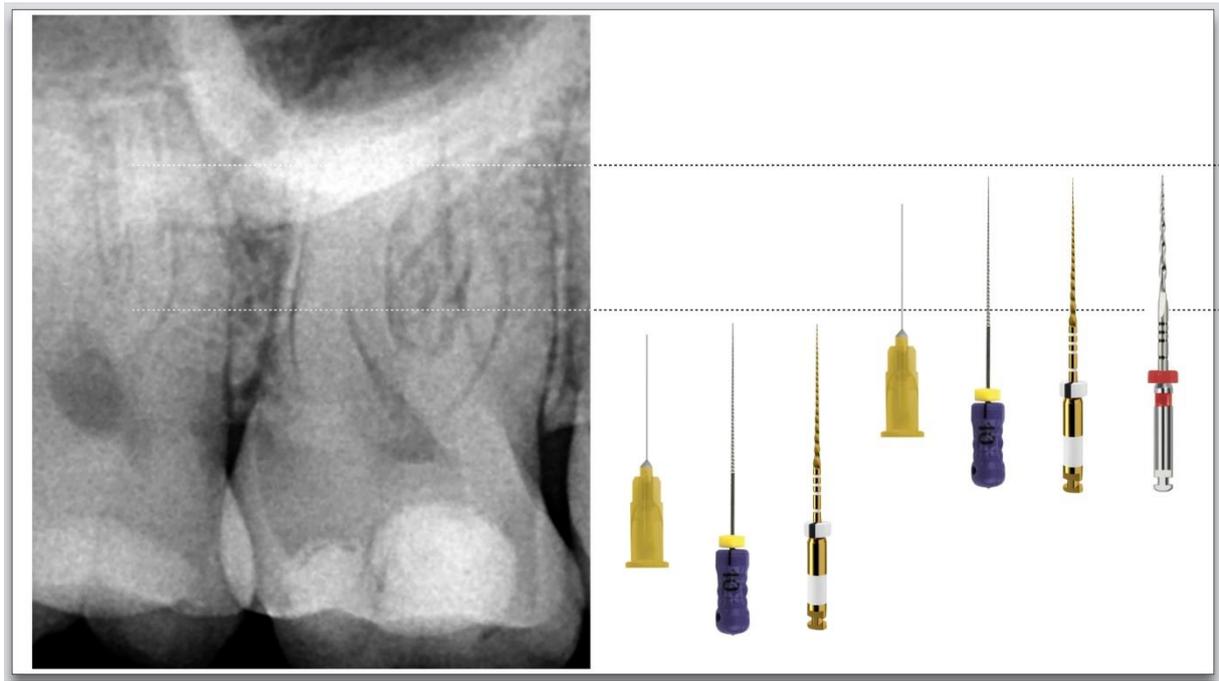

Después de la apertura del diente, rellene toda la cámara pulpar con solución de hipoclorito de sodio. Penetre en los canales con una lima de número 10 hasta que perciba resistencia. Mida esa longitud y prepare el canal a esta longitud utilizando el **EASY-FILE FLEX GLIDER**. Aclare abundantemente con hipoclorito de sodio. Utilice la lima 10 y muévala en el canal hasta la longitud de trabajo. Mida la longitud y prepare el canal a esta longitud utilizando el **EASY-FILE FLEX GLIDER**. Enjuague y termine la preparación del canal radicular introduciendo una lima **EASY-FILE FLEX** o **REVERSO BLUE** o **REVERSO SILVER** a la longitud de trabajo.