

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

Rendimiento ilimitado

dentsplysirona.com/protaperultimate
#endopassion

PART OF A



Solución ProTaper Ultimate™

Una solución que combina la última generación de limas ProTaper, una desinfección mejorada y una perfecta obturación en conjunto.

Conformación

ESTÁNDAR

Slider 016.002v



Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v



SÓLO CONDUCTOS DE MAYOR DIÁMETRO Y RECTOS

Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v



Desinfección



SmartLite® Pro
EndoActivator®


Próximamente

Aguja de irrigación



Obturación


Puntas de papel

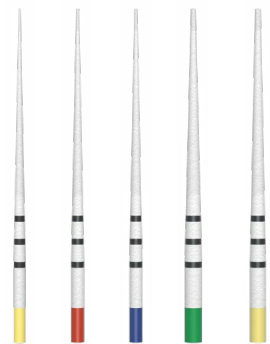

Sellador biocerámico
AH Plus®



Conform Fit®
Puntas guttapercha

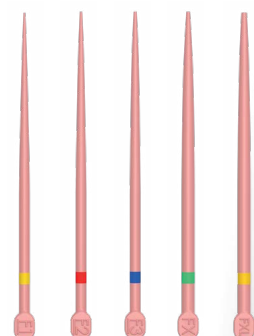

Conformación

1 Secuencia Slider-Shaper-Finishers para cubrir una amplia gama de anatomías

Deep
Shape
by 


Slider



Se puede utilizar directamente para **vía de deslizamiento** en la mayoría de los casos*

No es necesaria una Lima K

Shaper

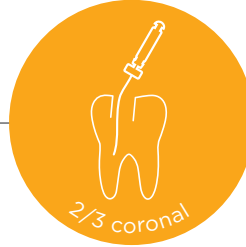

Mayor eficacia de corte y de eliminación de detritus en los dos tercios coronales

1 Conformación

Finishers



En el tercio apical, le proporciona la **flexibilidad para las anatomías más complejas**, sin romperse ni elongarse

0 Elongación

Nuestra diferencia

100% de los usuarios consideran que las limas ProTaper Ultimate™ proporcionan una preparación predecible del conducto radicular*



Más fuerte para una mayor resistencia



60% más rápido que el competidor A
130% más rápido que el competidor B


Desinfección

Más de un **25%** más de eficacia de irrigación en comparación con el hipoclorito de sodio sin activar*


Aguja de irrigación



La aguja de irrigación **se curva y flexiona fácilmente** proporcionando una limpieza y desinfección eficiente hasta el ápice

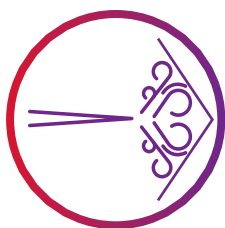



EndoActivator

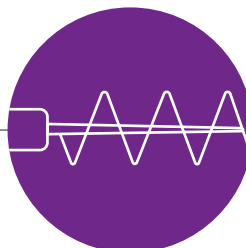


Los **fluidos activados** promueven una limpieza y desinfección profundas, lo que facilita la obturación en 3D y el éxito a largo plazo



Nuestra diferencia

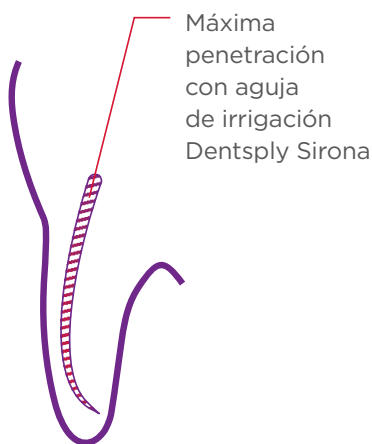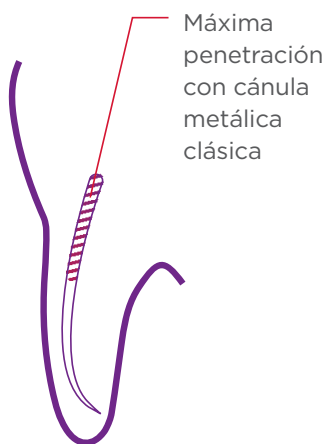

Comparación de las puntuaciones medias de los conductos laterales obturados

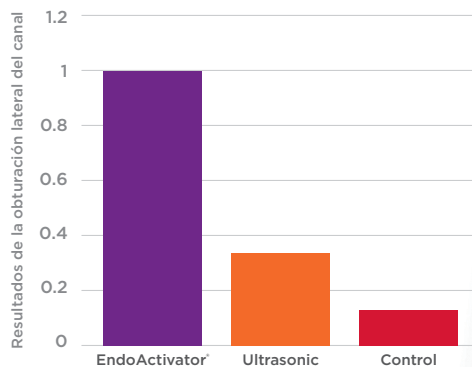

El **EndoActivator®** proporcionó **una mejor obturación** de los conductos laterales y accesorios del conducto y dio como resultado **menos residuos****


* Solo aplicable para EndoActivator®

** Un análisis cuantitativo y cualitativo de sistemas endodónticos ultrasónicos versus sónicos sobre limpieza y obturación de conductos Valerie Kanter, DMD, Emily Weldon, DMD, Uma Nair, DMD, MDS, Claudio Varela, DDS, MS, Keith Kanter, DDS, Kenneth Anusavice, PhD, y Roberta Pileggi, DDS, MS, GAINESVILLE, FL UNIVERSIDAD DE FLORIDA. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:809-813)

Obturación

Obturación con ajuste apical
el **100%** de las veces

**Sellador
biocerámico**

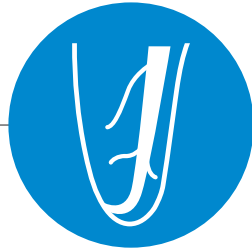

Biocompatible
y no daña el
tejido periodontal



**Conform Fit®
Puntas Guttapercha**




**Menos desperdicio
y ahorro de tiempo**
porque solo es necesario
un cono de guttapercha




Nuestra diferencia

Menos tiempo

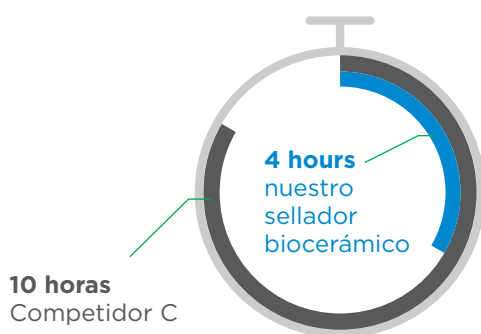


100%
de ajuste¹

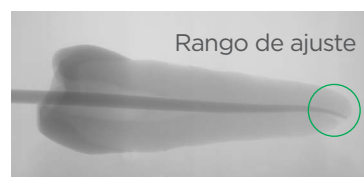

Rango de ajuste con
**Conform Fit®
Puntas Guttapercha**

VS

21%
de ajuste²
al utilizar conos
de gutaperchas
de bajo coste

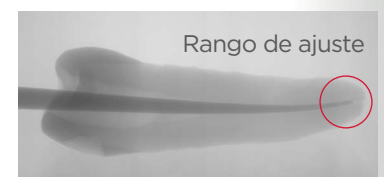









Rango de ajuste
con gutaperchas
de bajo coste

¹ En 28 cavidades del molde

² 28 conos aleatorios

Referencias de producto









Limas rotatorias ProTaper Ultimate™

SX	19 mm	B ST PULR 619 OSX	x6
			
Slider	21 mm	B ST PULR 321 OSL	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSL	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSL	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULR 321 OSH	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OSH	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OSH	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULR 321 OF1	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF1	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF1	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULR 321 OF2	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF2	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF2	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULR 321 OF3	x3
	25 mm	B ST PULR 325 OF3	x3
	31 mm	B ST PULR 331 OF3	x3
	21 mm	B ST PULR 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULR 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULR 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULR 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULR 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULR 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULR 631 FXL	x6

BLÍSTER DE LIMAS SURTIDAS

Slider, Shaper, F1, F2, F3	21 mm	B ST PULR 521 SQE	x5
	25 mm	B ST PULR 525 SQE	x5
	31 mm	B ST PULR 531 SQE	x5

Limas manuales ProTaper Ultimate™






SX	19 mm	B ST PULH 619 OSX	x6
			
Slider	21 mm	B ST PULH 621 OSL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSL	x6
Shaper	21 mm	B ST PULH 621 OSH	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OSH	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OSH	x6
F1	21 mm	B ST PULH 621 OF1	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF1	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF1	x6
F2	21 mm	B ST PULH 621 OF2	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF2	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF2	x6
F3	21 mm	B ST PULH 621 OF3	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OF3	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OF3	x6
FX	21 mm	B ST PULH 621 OFX	x6
	25 mm	B ST PULH 625 OFX	x6
	31 mm	B ST PULH 631 OFX	x6
FXL	21 mm	B ST PULH 621 FXL	x6
	25 mm	B ST PULH 625 FXL	x6
	31 mm	B ST PULH 631 FXL	x6

BLÍSTER DE LIMAS SURTIDAS

Slider, Shaper, F1, F2, F3	21 mm	B ST PULH 521 SQE	x5
	25 mm	B ST PULH 525 SQE	x5
	31 mm	B ST PULH 531 SQE	x5






ProTaper Ultimate™ Puntas de Guttapercha Conform Fit®

Caja de 60 puntas guttapercha

F1	B NS PULG FGP OF1
	
F2	B NS PULG FGP OF2
	
F3	B NS PULG FGP OF3
	
FX	B NS PULG FGP OFX
	
FXL	B NS PULG FGP FXL
	
SURTIDO	
F1-F3	B NS PULG FGP AST
	12x-F1, 24x-F2, 24x-F3

Puntas de papel ProTaper Ultimate™

Caja de 180 puntas de papel

F1	B ST PULP MPP OF1
	
F2	B ST PULP MPP OF2
	
F3	B ST PULP MPP OF3
	
FX	B ST PULP MPP OFX
	
FXL	B ST PULP MPP FXL
	
SURTIDO	
F1-F3	B ST PULP MPP AST
	30x-F1, 90x-F2, 60x-F3

Sellador Biocerámico AH Plus®




Kit de inicio	B KT AHBS 000 000
Recambio de jeringa	B 00 AHBS 100 03G
Recambio de cánula	B 00 AHBS 020 24G

Aguja de irrigación



x5	B NS DSIN 522 30G
x40	B NS DSIN D22 30G

	Limas	Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues	EC REP	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
	Guttapercha y puntas de papel	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604		Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
	Aguja de irrigación	Produits Dentaires SA , Rue des Bosquets 18, CH-1800 Vevey		PD Dental EU 74200 Thonon-les-Bains, France	1639
	Sellador biocerámico AH Plus®	Maruchi , 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311		Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197