

Informação para encomendas



Sof-Lex™ Spiral Rodas – Conjunto Inicial 50821

Nº do Artigo	Informação do Produto
50821	Sof-Lex™ Spiral Rodas – Conjunto de introdução 10 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Acabamento (bege); 10 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Polimento (brancas); 1 RA Mandril
5080	Sof-Lex™ Spiral Rodas de Acabamento – Recarga 30 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Acabamento (bege)
5081	Sof-Lex™ Spiral Rodas de Polimento – Recarga 30 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Polimento (branco)
50825K	Sof-Lex™ Spiral Rodas, Discos & Tiras – Conjunto de Sistema 10 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Acabamento (bege) 10 Sof-Lex™ Spiral Rodas de Polimento (branco) Sof-Lex™ Discos de Polimento Extrafinos 12,7 mm: 30 de cada: 2382C (Grosso); 2382M (Médio); 2382F (Fino); 2382SF (Superfino) Sof-Lex™ Discos de Polimento Extrafinos de 9,5 mm: 30 de cada: 2381C (Grosso); 2381M (Médio); 2381F (Fino); 2381SF (Superfino) Sof-Lex™ Tiras de Acabamento: 15 de 1954C/M (Grosso/Médio) 1 RA Mandril
1980	Sof-Lex™ Discos & Tiras – Conjunto de sistema 30 discos de cada: grosso, médio, fino, e superfino com diâmetros 12,7 mm e 9,5 mm; 1 RA mandril

O Sistema Sof-Lex

As rodas de acabamento e polimento Sof-Lex Spiral foram concebidas para se ajustar perfeitamente ao sistema Sof-Lex. Utilizam o mesmo sistema simples de mandril «pop-on».

	Sof-Lex™ Discos	Sof-Lex™ XT Discos	Sof-Lex™ Tiras	Sof-Lex™ Spiral Rodas	Anterior	Posterior	Interproximal
REDUÇÃO GROSSA	<ul style="list-style-type: none"> Remoção de excessos Contorno anatômico Remoção da acamada inibida pelo ar 				<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Discos, Grosso Instrumentos de contorno rotativo grosso ou médio (ex. diamantes, brocas de carbono, pedras) 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de contorno rotativo grosso ou médio (ex. diamantes, brocas de carbono, pedras) 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ XT Discos, Grosso Sof-Lex™ Tiras Grosso/Médio Grosso/Médio, estreito
CONTORNO FINAL	<ul style="list-style-type: none"> Reduzir a rugosidade da superfície Completar e refinar o contorno e as margens 				<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Discos, Médio Instrumentos de contorno rotativo médio ou fino (ex. diamantes de anel Amarelo ou vermelho) 	<ul style="list-style-type: none"> Instrumentos de contorno rotativo médio ou fino (ex. diamantes de anel Amarelo ou vermelho) 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ XT Discos, Médio Sof-Lex™ Tiras Grosso/Médio Grosso/Médio, estreito
ACABAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Eliminar riscas Alisar a superfície Pré-polimento 				<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de acabamento Sof-Lex™ Discos, Fino 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de acabamento 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de acabamento Sof-Lex™ XT Discos, Fino Sof-Lex™ Tiras, Fino/Superfino
POLIMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Polimento final de alto brilho 				<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de polimento Sof-Lex™ Discos, Superfino 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de polimento 	<ul style="list-style-type: none"> Sof-Lex™ Spiral Roda de polimento Sof-Lex™ XT Discos, Superfino Sof-Lex™ Tiras, Fino/Superfino



3M ESPE

3M ESPE Departamento Dentário
3M Portugal, Lda
Rua Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa

3M, ESPE, Filtek, Lava e Sof-Lex São marcas registradas da 3M Company ou da 3M Deutschland GmbH.

Utilizadas sob licença no Canada.

Todas as outras marcas registradas são propriedade de outras empresas.

© 2013, 3M. Todos os direitos reservados.

Sof-Lex™

Spiral rodas de acabamento e polimento



Reinventámos a roda

Rodas Sof-Lex™ Spiral...

Adaptam-se a todas as superfícies

Trabalham a partir de qualquer ângulo

Para restaurações anteriores e posteriores

Consegue-se rapidamente um polimento natural


3M ESPE

Reinventamos a roda

Sof-Lex™ Spiral Rodas de Acabamento e Polimento – a ferramenta versátil após a modelação!
Um sistema rápido para polir facilmente as restaurações e conseguir um acabamento natural.



Rodas Sof-Lex Spiral...

- Adaptam-se a todas as superfícies do dente
- Trabalham a partir de qualquer ângulo
- Para restaurações anteriores e posteriores
- Conseguem-se rapidamente um acabamento natural

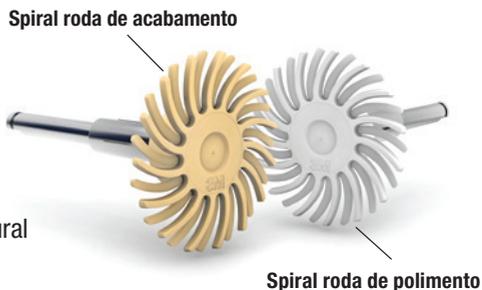

As Rodas Sof-Lex Spiral podem ser usadas para o acabamento e o polimento de superfícies de:

- Restaurações em compósito
- Ionómeros de vidro modificados com resina
- Restaurações temporárias de Bisacrilato
- Restaurações de Lava™ Ultimate CAD/CAM
- Metais preciosos e semipreciosos

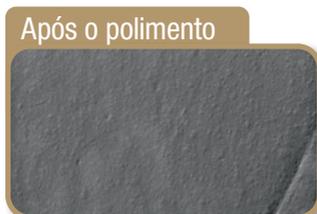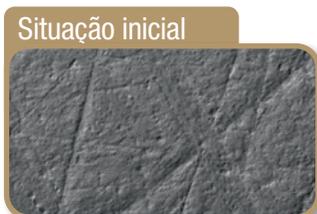

Sof-Lex™ Spiral rodas de acabamento e polimento produzem uma superfície suave melhor ou igual que os produtos mais avançados.

Uma forma para todos os ângulos!

Com o inovador design das rodas Sof-Lex Spiral, pode realizar-se o acabamento e o polimento das restaurações posteriores e anteriores apenas com uma única ferramenta – sem necessidade de mudar entre pontas, proteções, discos e escovas.



Oclusal



Bucal



Lingual posterior



Lingual anterior



Facial



Interproximal

A roda de acabamento fina (bege) suaviza e elimina as riscas originadas nas restaurações durante o contorno e prepara a superfície para um polimento de alto brilho. A roda de polimento superfina (branca) cria uma superfície muito suave de alto brilho especialmente com nanocompósitos tais como o Filtek™ Supreme XTE restaurador Universal.

As rodas Sof-Lex Spiral destinam-se a uma única utilização e trabalham sem pasta nem refrigeração por água. São concebidas para se integrar perfeitamente no sistema Sof-Lex já que utilizam o mesmo tipo de mandril de utilização fácil, tipo «pop-on».



You Tube™

Digitalize o código QR para obter a hiperligação para o canal do YouTube: "Sof-Lex™ Spiral Dental Finishing and Polishing Wheels"

