



# Ficha Técnica

<b>Designação</b>	HIPOCLORITO DE SÓDIO
<b>Referências</b>	I-204
<b>Visual</b>	
<b>Descrição</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solução líquida para irrigação e desbridamento de canais radiculares.</li> <li>• O hipoclorito de sódio é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio.</li> <li>• Em baixa concentração, dissolve principalmente tecido necrótico; em concentrações mais altas também destrói tecidos vitais.</li> </ul>
<b>Características</b>	<p><b>Procedimento:</b></p> <p>ÿ Esta solução é indicada para irrigação e desbridamento de canais radiculares durante o tratamento endodôntico. Remova o lodo com uma solução de irrigação adequada, como EDTA ou ácido cítrico a 12,5%.</p> <p>ÿ Reservado para uso profissional.</p> <p><b>Instruções:</b> Durante o preparo do canal, irrigue o quanto for necessário com a solução de hipoclorito de sódio.</p> <p>ÿ Encher a seringa com hipoclorito de sódio (quantidade recomendada: 10 ml). ÿ Prenda firmemente a agulha de irrigação na seringa. ÿ Irrigar o quanto for necessário. ÿ Remova a agulha de irrigação e coloque a seringa e a agulha em um recipiente de lixo para a atividade de cuidado de risco infeccioso.</p> <p><b>Precauções de uso:</b> ÿ Leia a</p> <p>Ficha de Segurança do Produto para manuseio do produto e informações de segurança.</p> <p>ÿ Não irrigue diretamente a região apical. ÿ Evite espalhar o produto em tecidos periféricos. ÿ Evite espalhar o produto em superfícies e materiais coloridos, pois o hipoclorito de sódio é um solução moderadamente alcalina com efeito branqueador.</p> <p><b>Avisos:</b></p> <p>ÿ Cuidado, produto corrosivo! ÿ Mantenha fora do alcance das crianças. ÿ Evite o contato com a pele e os olhos.</p>
<b>Composição</b>	Hipoclorito de sódio 2,5% Água e enchimento 97,5%
<b>Contente</b>	500ml
<b>Armazenar</b>	Armazenar em temperatura ambiente, em local seco, longe do calor e da luz solar direta.
<b>informação legal</b>	Dispositivo médico de classe IIa. marcação CE 0537. Organismo certificador EUROFINS EXPERT SERVICES Fabricante BIG SA

Versão 2.0  
Atualizado por RG