

Calificación
general del
96%

CFPM

Descripción

Clinibite Fast CLINIX es un excelente material de registro de mordida, de silicona de adición, de fraguado rápido. El tiempo de trabajo es de 30 segundos y el tiempo de fraguado es de un minuto desde el comienzo de la mezcla. El paquete contiene dos cartuchos de mezcla automática, de 50 ml, y 12 puntas para mezclar. Veinticuatro consultores usaron **Clinibite Fast CLINIX** en 341 aplicaciones clínicas.

Este producto recibió una **puntuación clínica del 96%**.


Comentarios de los consultores

- "Material muy duro, rígido y preciso."
- "Se dispensa de manera uniforme; sin engorros."
- "A los pacientes les gusta el fraguado rápido."
- "Requiere mucha presión para exponerse desde el cartucho."


"HE TENIDO
MENOS AJUSTES
CON REGISTROS
DE MORDIDA
CLINIBITE FAST CLINIX"



En comparación con los productos de la competencia:

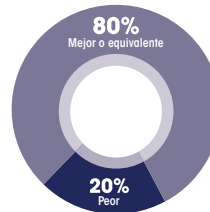

Porcentaje de consultores que:

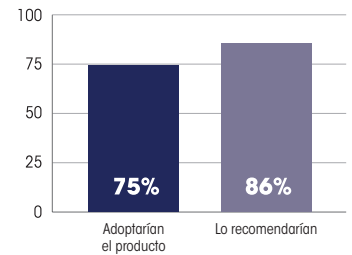

Características exclusivas

Clinibite Fast CLINIX tuvo una calificación de bueno a excelente en cuanto a la facilidad de dispensación y aplicación, viscosidad, facilidad de eliminación y detalle de impresión. El material fluye de manera uniforme en las superficies del diente. El registro de mordida fraguado presenta un detalle adecuado y se puede recortar con piedras o fresas de acrílico. Es demasiado duro y frágil para recortar con una hoja de bisturí. No se produce un recorte al articular los moldes. El 80% de los consultores calificaron el **Clinibite Fast CLINIX** como igual o mejor que el material de registro de mordida que utilizaban en ese momento. El 75% de los consultores lo comprarían y el 86% lo recomendaría.