



## PRODUCTO DE ALUMINIO

- **NO INTRODUCIR EN LAVAVAJILLAS**
- **NO UTILIZAR BAÑO DE ULTRASONIDOS**
- **TENGA CUIDADO CON LOS LIQUIDOS DE DESINFECCION : algunos son incompatibles con el aluminio. Lea con cuidado las instucciones.**

Este producto està fabricado en aluminio con una capa de color. El color del producto puede ser alterado con el uso de limpiadores quimicos.

No utilice sustancias quimicas demasiado alcalinas o acidas.  
Es recomendable un PH entre 4 y 8.

Lea siempre las instrucciones del fabricante antes de emplearlo en un producto de aluminio.

El fabricante no asumira responsabilidad alguna por uso indebido de limpiadores quimicos que ocasionen persjuicio o decoloracion del producto.

**ADVERTENCIA :** El uso de baños de ultrasonidos puede producir la perdida de la capa de color. No se aceptaran devoluciones de productor dañados como consecuencia del uso indebido de soluciones limpiadoras o baño de ultrasonidos.

Para esterilizar sin riesgos siga el siguiente procedimiento : autoclave (134°), esterilizacion quimica (132°) o calor seco (180°). Consulte las instrucciones del fabricante en cuanto a ciclo y tiempo.