

ES - Retractor de mejillas y labios KleerView - Instrucciones de uso

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Muy flexible y fácil de usar.

INDICACIONES

Para lograr accesibilidad al área de trabajo. El material transparente de KleerView es ideal para la fotografía clínica.

- Fijación ortodóntica de brackets
- Reducción/remodelación intraproximal
- Fotografía clínica

INSTRUCCIONES

Consulte a continuación la guía operativa estándar:

1. Para facilitar la comodidad del paciente, aplique bálsamo labial o vaselina en los labios del paciente antes de insertar los retractores de mejillas KleerView.
2. Sostenga ambos extremos y apriete los retractores juntos, doblando suavemente el arco de conexión del retractor de mejillas.
3. El arco se coloca en la barbilla del paciente y proporciona la tensión necesaria para mantener el dispositivo en su lugar.
4. Indique al paciente que abra la boca. Inserte los expansores intraorales de cada retractor de mejillas contra el interior de las mejillas del paciente. Guíe suavemente los labios del paciente para que se ajusten cómodamente en la curva de cada retractor de labios.
5. Para extraer KleerView de la boca, agarre con cuidado las asas de la mejilla izquierda y derecha. Perfecto para la adhesión lingual con una visibilidad excelente del arco superior.

REQUISITOS DE LIMPIEZA

Limpieza general antes de la esterilización: utilice un limpiador suave y un cepillo o esponja suaves, limpie y enjuague KleerView para eliminar cualquier residuo, sangre o saliva antes de colocarlo en una solución de desinfección fría. Coloque una banda elástica alrededor de la mejilla superior/inferior y el retractor de labios para reducir la tensión.

1. Colocar en desinfectante a 90 grados centígrados o;
2. colocar en una sola envoltura en una bolsa de plástico y esterilizar en autoclave a 121 grados Celsius.
3. Seque con un paño sin pelusa.
4. No esterilizar con calor seco.

INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Al transportar y almacenar el producto, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Almacene por debajo de 26 °C y alejado de la luz solar directa.
- No colocar en el refrigerador.
- Las fatigas del plástico con el tiempo y el uso diario pueden causar roturas.
- Algunos productos químicos y limpiadores pueden hacer que el retractor sea frágil y turbio.
- Siempre que el producto no haya estado expuesto a altas temperaturas, luz solar o humedad, tendrá una larga vida útil. Debido al proceso de esterilización se volverá opaco, se desarrollarán burbujas y grietas. Dichos artículos deben desecharse.

ELIMINACIÓN

El dispositivo está fabricado de policarbonato reciclable. Deseche de acuerdo con las regulaciones de su país o estado.

SÍMBOLOS



Dispositivo médico de clase I y cumple con la Directiva de dispositivos médicos (93/42/EEC)



Leer el manual



Fabricado por



Fecha de fabricación



Número de lote



Número de catálogo



Dispositivo médico



Reciclar



Por debajo de 26 grados centígrados



Almacenar lejos de la luz solar directa.



Solo para uso profesional



Importador