

Caso de estratificação posterior



- 1 Radiografia interproximal apresentando a cárie no elemento 36.
- 2 Situação inicial antes do tratamento. Cárie oclusal no primeiro molar inferior esquerdo.
- 3 Escolha da tonalidade com a escala de cores Vita: A2.
- 4 Tratamento da cárie
- 5 Condicionamento ácido do esmalte durante 30 s. e da dentina durante 15 s. com DENTOETCH



- 6 Enxaguar durante 15 s. e secar a cavidade até obter um aspeto branco calcário da superfície.
- 7 Aplicação do adesivo IPERBOND ULTRA durante 20 s. Em seguida, aplicar jato de ar ligeiro durante 5 s. Repetir a operação uma segunda vez. Fotopolimerização durante 20 s + 20 s.
- 8 Colocação de uma camada fina de IONOCEM (cimento de ionômero de vidro): técnica sanduíche.
- 9 Aplicação de uma camada de REFLECTYS Flow A3. Fotopolimerização durante 20 s.
- 10 Aplicação do compósito de dentina REFLECTYS A2 em duas fases. Fotopolimerização durante 20 s em cada fase.



- 11 Aplicação do compósito de esmalte REFLECTYS E numa camada fina. Fotopolimerização durante 20 s.
- 12 Pellicula de glicerina e fotopolimerização durante 20 s.
- 13 Controlo da oclusão, retoques e polimento com pontas polidoras adiantadas PERFECT POLISH.
- 14 Situação final após tratamento e reidratação completa.

Dr. Marco Morello (Itália)



REFLECTYS

UNIVERSAL RESTORATIVE COMPOSITE

Seringa (4 g) :
17 tonalidades*

Ponta doseadora unitária (0,25 g):
17 tonalidades*

- Kit de restauração:**
para todas as suas restaurações diárias
4 seringas Reflectys (A2, A3, A3.5, B2)
+ 1 Adesivo Iperbond Ultra
- Kit de estratificação:**
para casos estéticos mais delicados
7 seringas Reflectys (A1, A2, A3, Opaque A2, Opaque A3, Email, Incisal)
+ 1 Adesivo Iperbond Ultra
+ 1 gel de condicionamento ácido DentoEtch

* Bleach, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, Opaca A2, Opaca A3, Esmalte, Incisal, Pediátrica. Ver gama de tonalidades no verso.



Reflectys Flow
A versão fluida de Reflectys (2 g)

www.itena-clinical.com



Exclusivamente para uso dentário. Dispositivo médico de classe IIa. Reservado a profissionais de odontologia. Leia com atenção as instruções indicadas no folheto, antes de proceder a qualquer utilização. Itena Clinical 31 avenue Georges Clemenceau - 93420 Villepinte, France. Tel : + 33 (0)1 45 91 61 30. Ind 2-0421

REFLECTYS

UM COMPÓSITO ESTÉTICO

PARA TODAS AS SUAS RESTAURAÇÕES



Formulado para os seus casos clínicos dos mais simples aos mais complexos

Desde o seu lançamento em 2012, Reflectys tem sido um dos compósitos odontológicos de maior sucesso no mercado.

ITENA Clinical optou por simplificar a sua prática clínica, oferecendo um compósito adaptado às suas necessidades diárias, bem como às situações clínicas mais complexas.


Composição otimizada

Este compósito micro-híbrido nanorreforçado e fotopolimerizável é composto por 20% de resina matriz e 80% de cargas inorgânicas.

Uma mistura de partículas de diferentes tamanhos e composições que permite aumentar a percentagem de cargas e as propriedades mecânicas do compósito.

Resultados:

- *propriedades estéticas e manipulação otimizadas.*
- *melhores propriedades de polimento e resistência.*

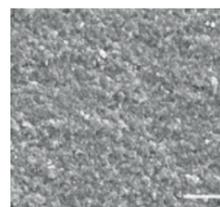

Corte transversal do Reflectys sob um microscópio eletrónico de varrimento x 10 000



INDICAÇÕES

- Restaurações posteriores sujeitas a elevado stress
Restaurações anteriores que exigem um elevado nível estético
- classe I a V
 - correções de formato e cor
 - dentes fraturados após traumatismo
 - dentes de leite

Tire partido de todos os benefícios de Reflectys

Uma estética excepcional

- Poder real de mimetismo: reflexo perfeito do dente natural.
- Resultado extremamente brilhante após polimento.
- Obturação invisível: os limites do compósito não são perceptíveis.
- Índice baixo de contração na polimerização: integridade impecável nos limites da restauração.


Uma manipulação fácil

- Material de excelente maleabilidade: textura ideal que se trabalha com facilidade e rapidez.
- Não adere aos instrumentos nem às luvas.
- Polimento rápido e fácil.


O compósito ideal para todas as suas restaurações ântero-posteriores.

Propriedades mecânicas extraordinárias

Graças à sua composição rica em micropartículas e nanopartículas, Reflectys possui uma **resistência otimizada à abrasão, compressão e fratura.**

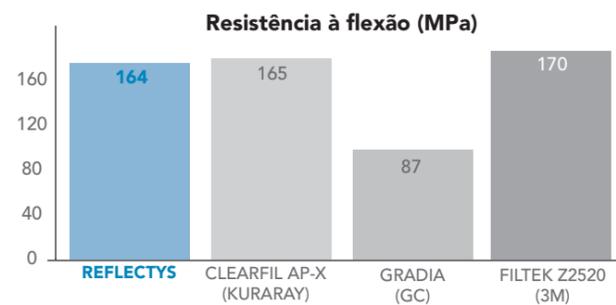


Fonte: estudo interno, departamento I&D da Itena Clinical

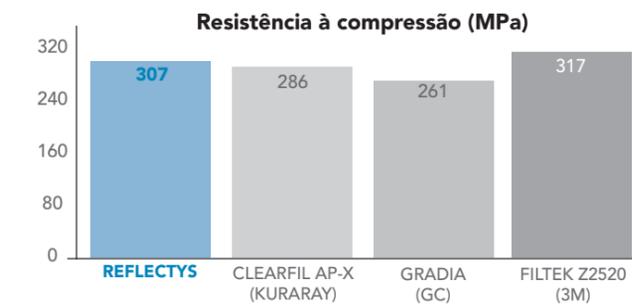

Para obter êxito com todas as suas restaurações


Tonalidades "Dentina"

Tonalidades universais com translucidez média, para se adaptarem a todos os casos clínicos.

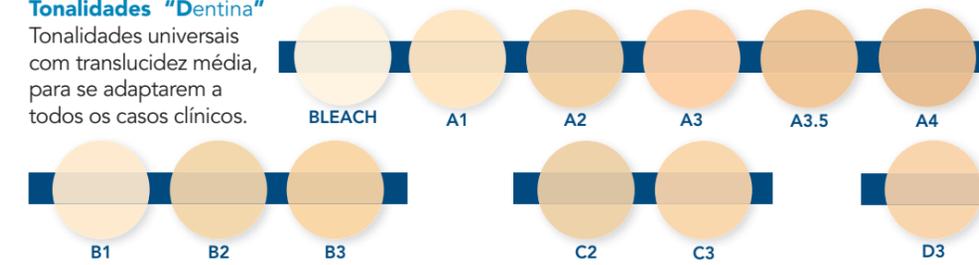


Tonalidades "Opacas"

Translucidez muito baixa para disfarçar manchas dentárias.

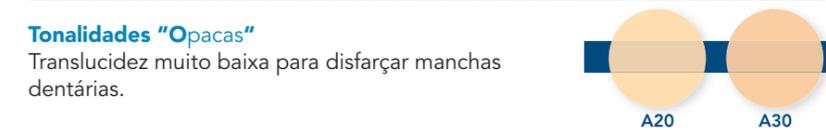


Tonalidade Esmalte

Translucidez elevada. Esta tonalidade destina-se a reproduzir a camada de esmalte acima da camada opaca ou da dentina, previamente fotopolimerizada. Destina-se a dentes adultos.

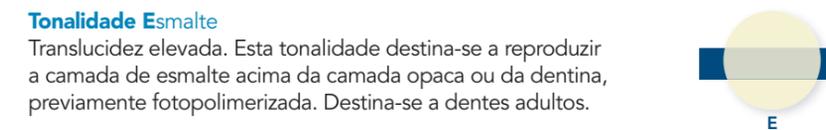


Tonalidade Incisal

Muito translúcida. Desenvolvida para restaurações de esmalte de jovens adultos e para áreas que exigem transparência natural.

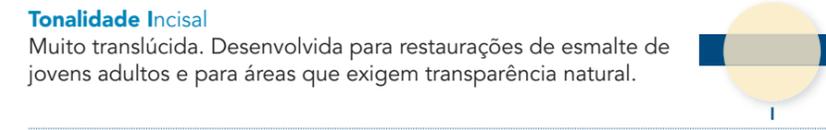


Tonalidade Pediátrica

Translúcida e ligeiramente calcária. Recomendada para dentes de leite.

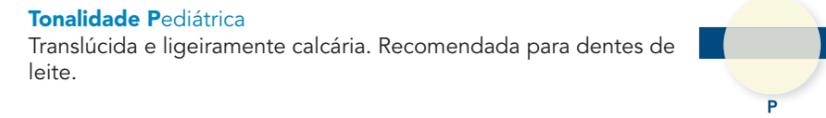

17 tonalidades disponíveis em formato de seringa ou pontas doseadoras

- **Esta vasta escolha permite-lhe criar a sua própria escala de cores.**
- **As suas estratificações são otimizadas para um resultado estético natural.**

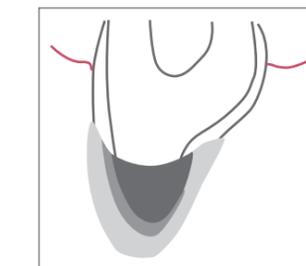

- Tonalidade dentina opaca
- Tonalidade dentina de corpo
- Tonalidade esmalte

Fotos extracontratuais