




SimpliShade™

Sistema Simplificado de Compósito Universal

Simplifique o seu fluxo de trabalho só com três tons.

SimpliShade, dotado com Adaptive Response Technology, abrange as 16 cores VITA® classical só com 3 tons. Simplifique a gestão do seu inventário e poupe tempo na escolha da cor, confiando nas qualidades de manipulação Premium e nas restaurações altamente estéticas. Faça com que os seus pacientes sorriam com confiança e simplifique o seu trabalho com SimpliShade.

Características e Benefícios

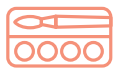

Simplifica a Equivalência da cor

A seleção de tons é mais fácil e rápida. SimpliShade combina as 16 cores Vita Classical só com 3 tons: Light, Medium, Dark.



Adaptive Response Technology (ART)

A rede de nanopartículas ART, uma tecnologia comprovada presente em Harmonize, ajuda a conseguir restaurações naturais com uma resistência extraordinária e uma estética inigualável.



Agiliza a Gestão de Inventário

Poupa tempo e dinheiro com os mínimos tons que satisfazem quase todas as necessidades do seu compósito. Evita a reorganização de várias referências e reduz a eliminação de produtos caducados.



Universal para Todas as Classes de Cavidades

SimpliShade pode-se usar com confiança em todas as classes de cavidades, sem necessidade de um opaco, como OMNICHROMA®.

Simplificação Sem Compromisso


Simplifique o seu fluxo de trabalho e a gestão do inventário sem comprometer as coisas que mais importam quando se trata das suas restaurações.

Restaurações que Brilham


O tamanho das partículas, mais pequeno de SimpliShade de 50nm, permite melhor capacidade de polimento e manutenção do brilho ao longo do tempo.²

Polimento (UB: unidades de brilho)

Progloss, 10 segundos

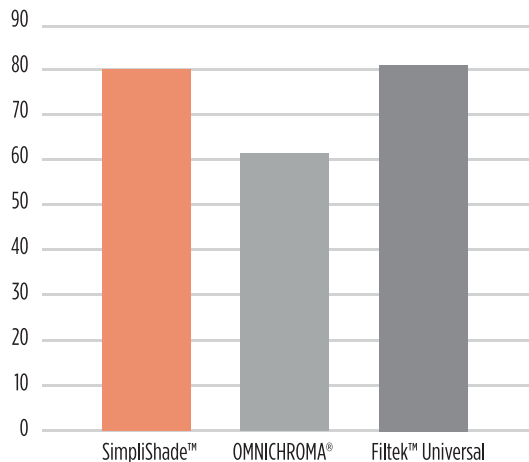


Desgaste do brilho após escovagem (UB)

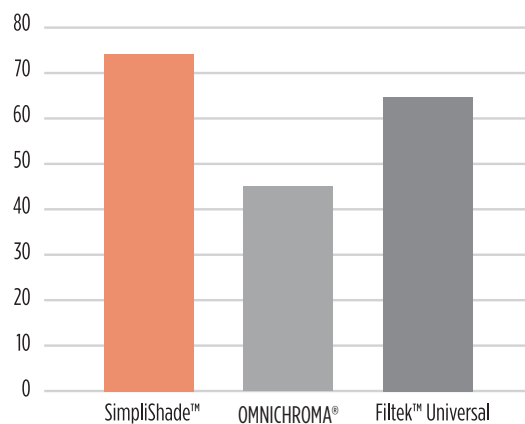

Restaurações Duradouras


O sistema ART concede uma carga alta de 81% para uma excelente resistência a fissuras e fraturas ao longo do tempo.

Resistência á Flexão (MPa)

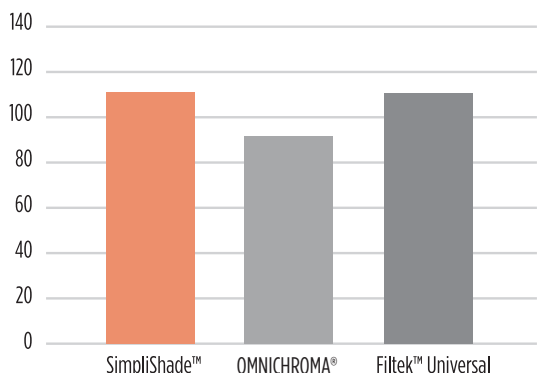

Universidade de Alabama em Birmingham

Desgaste Volumétrico (mm³)

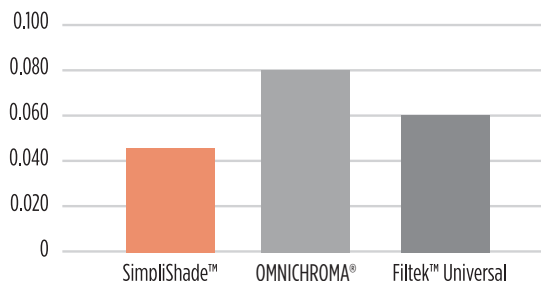

Radiopacidade Excelente

Quanto mais radiopaco, mais fácil de distinguir a restauração da estrutura do dente numa radiografia. SimpliShade (300% Al) apresenta quase o dobro da radiopacidade de OMNICHROMA.¹



Radiografia tirada de um dente humano numa restauração de Classe II.²


Optima Translucidez

SimpliShade proporciona a opacidade ideal para mimetizar a estrutura dentária, para melhor mascarar as manchas dentárias subjacentes e harmonizar bem com os dentes adjacentes, resultando numa restauração mais natural.²



Melhor mimetismo

SimpliShade têm um efeito camaleónico aprimorado para um mimetismo melhor, em comparação com OMNICHROMA usado com Blocker (opaco).²

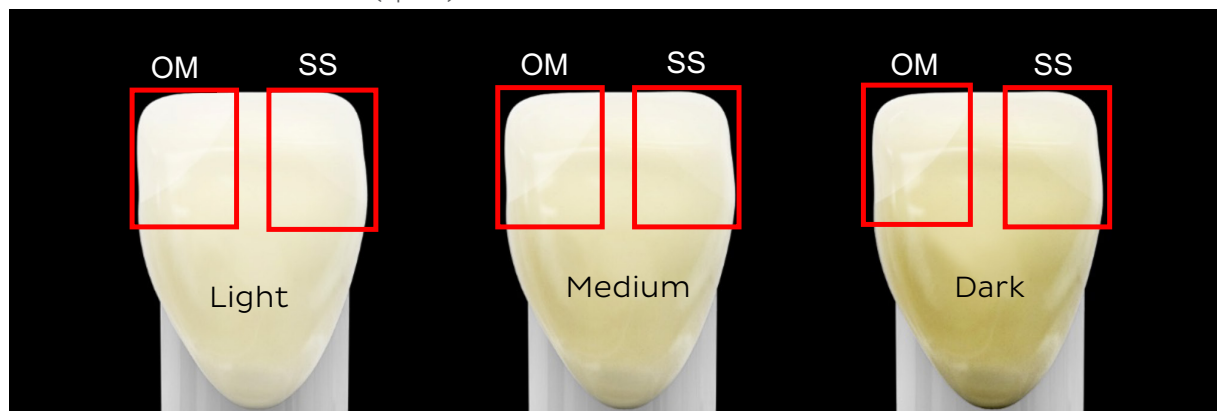


OM - OMNICHROMA® com Blocker SS - SimpliShade™

SimpliShade Antes e Depois


Equivalências cores ao Guia VITA

LIGHT

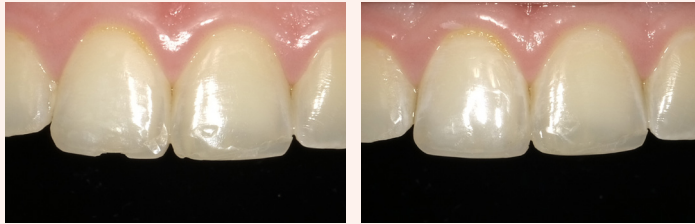

A1, B1, B2, C1, D2

MEDIUM

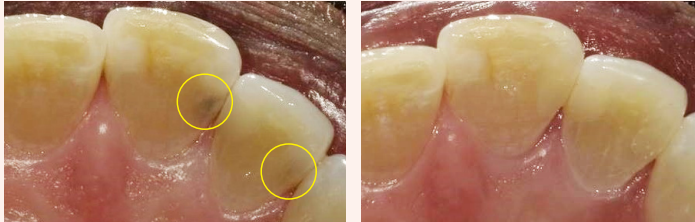

A2, A3, C2, D3, D4

DARK



A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Imagens por cortesia do Dr. Matthew Miller

Informação para Pedidos

- 37001** Seringa, Light
- 37002** Seringa, Medium
- 37003** Seringa, Dark
- 37004** Seringa, Bleach White
- 37005** Seringa, Universal Opaque

- 37006** Unidose 20 Unidades, Light
- 37007** Unidose 20 Unidades, Medium
- 37008** Unidose 10 Unidades, Dark
- 37009** Unidose 10 Unidades, Bleach White
- 37010** Unidose 10 Unidades, Universal Opaque

Para mais informação visite Go.Kerrdental.com/Simplishade

Referências:

1. Universidade de Alabama em Birmingham
 2. Kerr. Dados internos disponíveis com solicitação prévia
- SimpliShade é uma marca comercial de Kerr Corporation. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. O estudo da Universidade de Alabama em Birmingham foi um estudo cego patrocinado pela Kerr.