

# Cleanic<sup>®</sup>

Pasta profiláctica de un solo paso



## TODO EN UNO

Pasta profiláctica universal que garantiza unos resultados extraordinarios



## TECNOLOGÍA DE PERLITA PATENTADA

Variabilidad de abrasión integrada



## CIENTÍFICAMENTE DEMOSTRADO

Máxima limpieza y pulido con baja abrasión del esmalte y la dentina



## AHORRO DE TIEMPO

De la limpieza al pulido en un solo paso



**Cleanic** es una pasta profiláctica de un solo paso que garantiza a sus pacientes resultados de limpieza y pulido sobresalientes, con una baja abrasión del esmalte y la dentina.

Esto se consigue gracias a la variabilidad de abrasión integrada de las partículas de perlita natural, clínicamente probada.



## ALLÍ DONDE LAS PASTAS PROFILÁCTICAS TRADICIONALES NO DAN LA TALLA...

Las pastas tradicionales, normalmente basadas en piedra pómez, son agresivas para el esmalte, la dentina y las obturaciones, lo que provoca:

DECOLORACIÓN  
Y FORMACIÓN  
DE SARRO

DAÑOS  
INNECESARIOS  
EN LOS TEJIDOS DUROS

MARCAS  
EN EL ESMALTE  
Y LA DENTINA

PÉRDIDA EVIDENTE DE  
TEJIDO CON EL PASO  
DEL TIEMPO



Además, suelen exigir el doble de trabajo al ser necesarias dos pastas con distintos granos para ser eficaces. Esto suele provocar la omisión de la fase del pulido en el procedimiento a fin de ahorrar tiempo, con la consiguiente decoloración de la superficie sin pulir y acumulación de placa con el paso del tiempo.

## ¿POR QUÉ ES DIFERENTE CLEANIC?

Cleanic es la única **pasta profiláctica de limpieza y pulido de un solo paso** basada en la tecnología perlita. Esto significa que la limpieza y el pulido son suaves, pero eficaces. Todo se realiza en una única sesión con una pasta.



Cleanic disponible en 5 sabores

-  Frutas del Bosque
-  Menta
-  Manzana Verde
-  Light
-  Menta sin Fluoruro

# VARIABILIDAD DE ABRASIÓN INTEGRADA


Las partículas de perlita volcánica (sílice natural) adaptan su abrasión durante el procedimiento.

## LIMPIEZA

Cuando se aplica Cleanic por primera vez en la superficie dental, se comportará como una pasta gruesa. En ese momento, la capacidad de limpieza de Cleanic alcanza su punto álgido.

## PULIDO


Bajo presión y en cuestión de segundos, las partículas abrasivas se fraccionan y sus bordes de corte se redondean resultando menos cortantes. En este punto, la pasta proporciona un pulido de alto brillo.

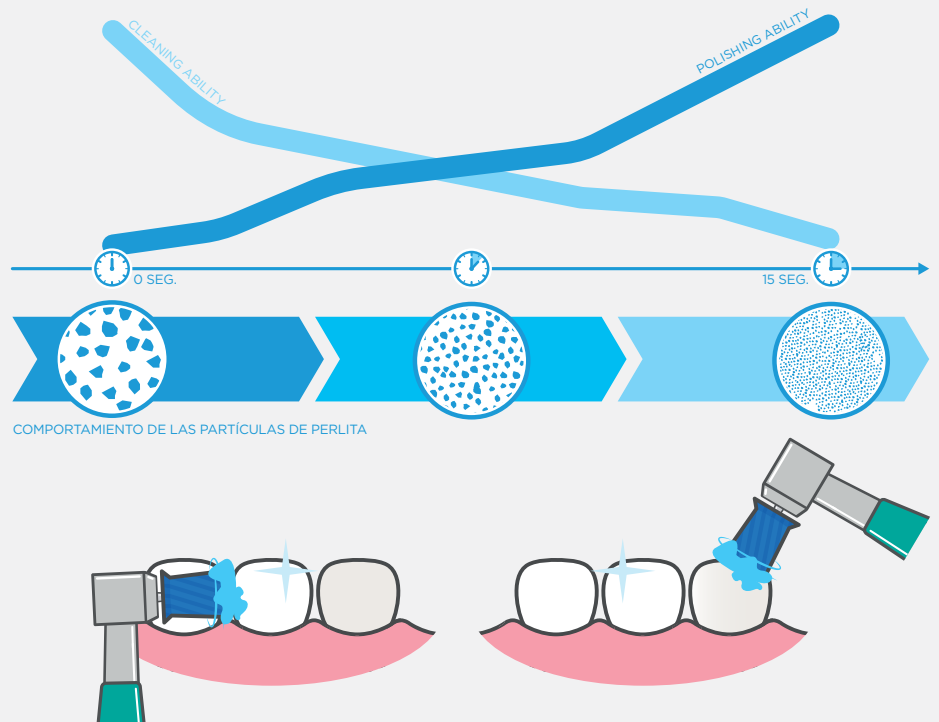

# UTILIZACIÓN DE CLEANIC

Aplicar Cleanic con una copa de goma (p. ej. Pro-Cups) en un grupo pequeño de dientes a la vez (unos 3) para trabajar en un solo paso desde la limpieza hasta el pulido.

Una vez que haya acabado, aplicar una nueva cantidad de Cleanic para tratar el siguiente grupo de dientes.

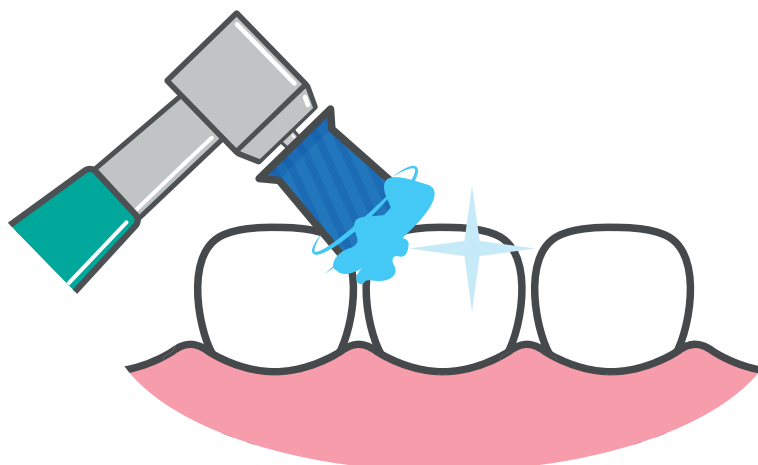

## DENTICIÓN NORMAL:

Trabajar desde la superficie incisal/oclusal de cada diente hacia la zona de la encía, de este modo se minimiza la abrasión sobre la superficie dental.

## DENTINA O SUPERFICIES RADICULARES EXPUESTAS:

Comenzar aplicando una cantidad de pasta nueva a la superficie del esmalte. Desplazarse hacia las superficies expuestas de la raíz o la dentina con la pasta ya usada para que sea menos agresiva.

## ¡SOLICITE AHORA SU PEDIDO DE CLEANIC

Ref.	Descripción	Contenido	Fluoruro	RDA	REA	Sabor	Mentol	Color de la pasta
3310	Cleanic Repuesto en Cartucho	200g	0.15% CaF	27	3.4	Menta	Y	Azul Claro
3330	Cleanic Repuesto en Cartucho	100g	0.15% CaF	27	3.4	Menta	Y	Azul Claro
3210	Cleanic Repuesto en Cartucho sin fluoruro	200g	-	27	3.4	Menta	Y	Azul Claro
3230	Cleanic Repuesto en Cartucho sin fluoruro	100g	-	27	3.4	Menta	Y	Azul Claro
3340	Cleanic Dosis individuales	200x 2g	0.10% NaF	27	3.4	Menta	Y	Azul Oscuro
3180	Cleanic en Tubo Menta	100g	0.10% NaF	27	3.4	Menta	Y	Azul
3382	Cleanic en Tubo Manzana Verde	100g	0.10% NaF	27	3.4	Manzana Verde	N	Verde
3183	Cleanic en Tubo Menta sin fluoruro	100g	-	27	3.4	Menta	Y	Azul Claro
3384	Cleanic en Tubo Light	100g	0.10% NaF	27	3.4	--	N	Gris claro
3386	Cleanic en Tubo Frutas del Bosque	100g	0.10% NaF	27	3.4	Frutas silvestres	N	Rosa
3190	Cleanic Collection Kit	3x 100g Cleanic en tubo (Menta con fluoruro, Manzana verde, Light), 1 exprimidor para tubo, bolsa reutilizable						

## ¡PRUEBE CLEANIC CON SUS COMPAÑEROS PERFECTOS!

### Pro-Cup y Pro-Cup Junior

El perfil laminado de estas copas de un solo uso ayuda a evitar la formación de salpicaduras durante la aplicación de la pasta. El mismo perfil también ayuda a mitigar el sobrecalentamiento. Pro-Cup y Pro-Cup Junior no están fabricados con látex natural.

	CÓDIGOS Y UNIDADES				COLOUR	DESCRIPCIÓN	Tipo		UN SOLO USO
	REF	PAQUETE DE	REF	PAQUETE DE			Pasador	Rosca	
	Pro-Cup	990/30	30	990/120	120	● Pro-Cup - Blanda	✓		✓
		991/30	30	991/120	120	● Pro-Cup - Dura	✓		✓
		1810/30	30	1810/120	120	● Pro-Cup - Blanda		✓	✓
		1811/30	30	1811/120	120	● Pro-Cup - Dura		✓	✓
	Pro-Cup Junior	992/30	30	992/120	120	● Pro-Cup Junior - Blanda	✓		✓
		993/30	30	993/120	120	● Pro-Cup Junior - Dura	✓		✓
		1812/30	30	1812/120	120	● Pro-Cup Junior - Blanda		✓	✓
		1813/30	30			● Pro-Cup Junior - Dura		✓	✓



### Soportes para pasta de Kerr

Estos soportes ergonómicos para pasta profiláctica de Kerr, disponibles de un solo uso o multiusos, son fáciles de encajar en el dedo y disponen de suficiente espacio y volumen, incluso para cantidades mayores de pasta si fuesen necesarias.

#### Ring Pots - No esterilizable en autoclave

Referencia	Descripción
985	Anillos - Azul - Paquete de 100
986	Anillos - Colores Surtidos - Paquete de 100

#### Prophy Clips - Esterilizable en autoclave

Referencia	Descripción
3151	Prophy Clips - Paquete de 6