

## INFORMACION IMPORTANTE

Estimados,

muchas gracias por la confianza concedida con la compra del nuevo líquido **Multisteril CD Ctrl+Alt**.

El líquido nuevo tiene una capacidad de deterción y desinfección certificada.

Las prestaciones del aparato van a aumentar.

**Multisteril CD Ctrl+Alt** ha sido desarrollado para el **SISTEMA MULTISTERIL** con la colaboración de importantes institutos como la Universidad de Dresda que ha testado y certificado la eficiencia del sistema.

Visite nuestra página web para ver más info sobre este tema.

[http://www.tecnogaz.com/tecnogaz/product\\_top.aspx?id=1218](http://www.tecnogaz.com/tecnogaz/product_top.aspx?id=1218)

Si ud. utiliza este líquido por la primera vez, es importante que se vacíe el tanque del detergente antes de rellenar con el líquido nuevo. Por favor ver las instrucciones al revés.

***Si esto no se ha hecho, los dos líquidos se mezclarán y se habrá un líquido tipo leche.***

Además el nuevo líquido tiene que ser utilizado con una concentración del 1%.

Por lo tanto hay que entrar en el menu del aparato, elegir **MODIFICACION DEL CICLO** y modificar **INGRESO DEL DETERGENTE**.

De esta manera Ud. podrá reducir del 50% los gastos.

Saludos cordiales,  
**TECNO GAZ S.p.A.**

### TECNO-GAZ S.p.A

Capitale Sociale € 280.000 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA IT00570950345  
R.E.A. PR 138927  
Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: PR 10061  
tel. +39 0521 83.80 fax +39 0521 83.33.91  
info@tecnogaz.com www.tecnogaz.com

### Sede | Headquarters

Strada Cavalli, n. 4  
C.A.P. 43038  
Sala Baganza  
Parma  
Italia

### Stabilimento 2 | Factory 2

Via VIII Marzo, n. 4  
C.A.P. 42025  
Cavriago  
Reggio nell'Emilia  
Italia

### Magazzino | Warehouse

Via Aldo Moro, n. 9  
C.A.P. 43038  
Sala Baganza  
Parma  
Italia

## INSTRUCCIONES DE USO

### Vaciado del depósito detergente:

Para vaciar completamente el depósito del detergente, utilizar el dispositivo y, cuando éste solicite la introducción de nuevo detergente, presionar y mantener presionado el botón **SELECT** y, al mismo tiempo, presionar y mantener presionado el botón **OK**.

Después de 5 segundos, la bomba peristáltica es accionada. Durante esta fase, el dispositivo emite una señal acústica intermitente que se interrumpe sólo al completamiento de la fase. El detergente es descargado directamente en la cuba a través de la boquilla posicionada en la tapa.

Después de aprox. 10 minutos, abrir ligeramente la tapa (sin activar el sensor de apertura tapa) y comprobar que no salga detergente de la boquilla.

Una vez finalizada la operación de vaciado, interrumpir el proceso presionando el botón **STOP**.

### Modificación de los ciclos

Seleccionar el ciclo a modificar.

Presionar el botón **OK** para visualizar el MENU.

#### Ajustes disponibles:

Standby ON - OFF -

Entrada detergente 0 ÷ 6 % 1%

Calentamiento 30 ÷ 60 °C 10 °C

Función Degas SI - NO -

Función SWEEP SI - NO -

Limpieza por ultrasonidos 0 ÷ 30 min 1 min

Secado SI - NO -

Presionar el botón **OK** para visualizar los parámetros del ciclo.

Presionar el botón **SELECT** para modificar el valor del parámetro seleccionado.

**El menú de los parámetros y de los ajustes dispone de desplazamiento cíclico.**

Una vez completada la configuración, seleccionar **EXIT** y presionar **SELECT** para salir del **MENU**.

**Los cambios serán guardados.**

**SE PUEDEN VER MÁS DETALLES EN EL MANUAL DE USUARIO INCLUIDO EN EL APARATO**