

#niwop



video.wh.com

Ahora en su  
distribuidor  
o en **wh.com**



# Happy

patient

# Happy

professional



**proxeo** AURA Sistema de aeropulidor



## Usted tiene el control

El aeropulidor Proxeo Aura Air es un verdadero multitallento. Los depósitos de sarro blando y las decoloraciones se pueden eliminar de forma eficaz y completa sin necesidad de cambiar la pieza de mano. El polvo, la pieza de mano y los accesorios para pulverización están perfectamente ajustados entre sí y garantizan una limpieza cuidadosa y a fondo, tanto supra como subgingival.



Bolsas subgingival > 3 mm

Supragingival, surco, bolsa subgingival < 3 mm





### Estilizado – casi como una sonda periodontal

Las finas y estériles puntas periodontales le permiten trabajar con suavidad, incluso en las bolsas más profundas. Suaves y flexibles, se adaptan perfectamente a las condiciones periodontales. La abertura lateral permite desviar el chorro lateralmente, lo que favorece una limpieza suave.



### Pulverización controlada

El chorro de polvo óptimamente integrado garantiza una pulverización centrada para un trabajo controlado y eficiente. Además, al salir, el polvo es envuelto en una capa de agua, lo que reduce la emisión de polvo.




### Adaptación óptima

Con la función de giro de 360°, los cabezales de pulverización siempre se pueden adaptar dinámicamente a la posición de tratamiento.



### Con el ángulo adecuado

Gracias a los cabezales de pulverización Perio y los cabezales de pulverización en ángulo de 90° o 120° en dos longitudes diferentes, usted estará bien equipado incluso para lugares de difícil acceso.

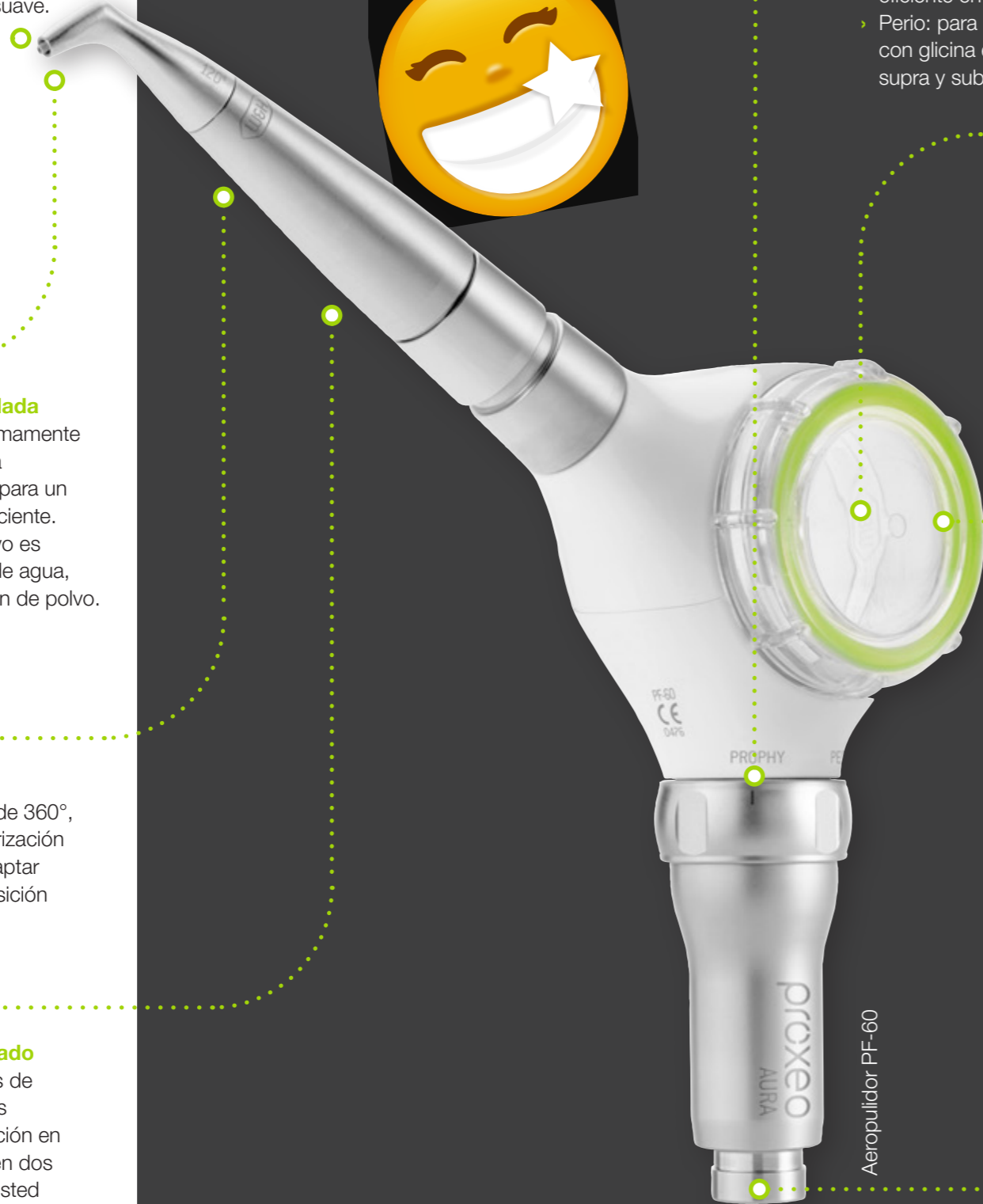

### Usted elige

Establezca la presión de trabajo adecuada para adaptarse a la indicación clínica utilizando el anillo de regulación y obtenga resultados de tratamiento brillantes en todo momento.

- Profilaxis: para un trabajo eficiente en el área supragingival
- Perio: para un tratamiento suave con glicina en polvo en la zona supra y subgingival



### Fácil rellenado

Con la apertura lateral del depósito para el polvo, no es necesario sujetar la pieza de mano durante el rellenado, sino que puede colocarla sobre la mesa. De este modo, siempre tendrá las dos manos libres y podrá reponer el polvo cómodamente.



### Fluidez de trabajo

Gracias al depósito transparente para el polvo se puede ver siempre la cantidad de polvo restante. Permiéndole integrar el cambio de polvo en su rutina de trabajo con total facilidad.




### 4 conexiones de turbina diferentes

El aeropulidor Proxeo Aura está disponible con conexiones para W&H Roto Quick, KaVo Multiflex, NSK y SIRONA. Simplemente conéctelo a la manguera de la turbina y empiece a trabajar.

## Un sistema de aeropulidor

Ya sea que trabaje supragingivalmente, en el surco o en bolsas más profundas, con la combinación del polvo adecuado, la configuración correspondiente en el anillo de regulación y el cabezal de pulverización apropiado, le aseguran que siempre obtenga los mejores resultados de tratamiento.

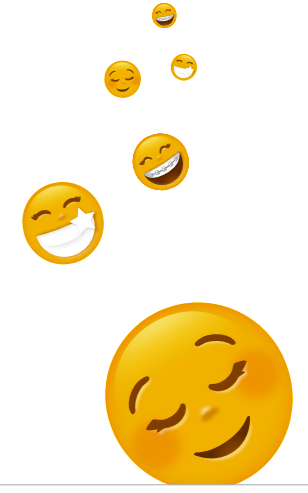

Aplicación	Ajuste	Polvo	Cabezal de pulverización
<p>Supragingival</p>	<p>Prophy</p>		<p>Estándar</p> <p>Opcional</p>
<p>Supragingival, surco, bolsa subgingival &lt; 3 mm</p>	<p>Perio</p>		<p>Estándar</p> <p>Opcional</p>
<p>Bolsa subgingival &gt; 3 mm</p>	<p>Perio</p>		<p>Estándar</p> <p>Opcional</p>

# Proxeo Aura Polvos de pulido

## Prophylaxis Powder SOFT

Elimina suave y eficazmente el biofilm supragingival y la decoloración de la superficie del diente.

### INDICACIONES

- › Eliminación de decoloraciones extrínsecas
- › Limpieza de fisuras y caries
- › Limpieza de los brackets de ortodoncia

## Prophylaxis Powder SMOOTH

Elimina suavemente el biofilm supragingival mediante partículas esféricas, protegiendo al mismo tiempo el tejido.

### INDICACIONES

- › Limpieza dental con acabado brillante, evitando daños en el esmalte
- › Limpia suavemente los materiales de restauración, los brackets, los empastes, los márgenes de las caries y las fisuras
- › También permite el tratamiento de pacientes que siguen una dieta sin sal

## Prophylaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder

Elimina suavemente el biofilm supra y subgingival.

### INDICACIONES

- › Eliminación cuidadosa de las decoloraciones
- › Manejo del biofilm en bolsas periodontales
- › Terapia de mantenimiento periodontal
- › Cuidado de los implantes y tratamiento de la periimplantitis
- › Limpieza de los brackets de ortodoncia
- › Limpieza cuidadosa de los materiales de restauración
- › Mínimamente invasivo en cuellos dentales expuestos y dentina
- › Reduce la exposición a las bacterias que forman colonias



Indicación clínica	SOFT	SMOOTH	SENSITIVE
Retirada el biofilm supragingival	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eliminación de decoloraciones extrínsecas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eliminación el biofilm subgingival			<input type="radio"/>
Manejo del biofilm en bolsas periodontales			<input type="radio"/>
Mantenimiento de las superficies de implante			<input type="radio"/>
Tratamiento de la periimplantitis			<input type="radio"/>
Limpieza de los materiales de restauración		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuidado de los empastes		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpieza de los brackets	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpieza de los bordes de las caries antes del grabado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Limpieza de las fisuras antes del sellado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preparación para el blanqueamiento dental	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Limpio e higiénico



### Fácil de limpiar

Las herramientas de limpieza especiales se pueden utilizar para mantener la pieza de mano y los cabezales de pulverización limpios en todo momento.



### Preparación higiénica

La pieza de mano se puede desinfectar fácilmente con un paño. Los cabezales de pulverización extraíbles son termodesinfectables y esterilizables.

## Sets para un tratamiento con aeropulidor de éxito



### Set Proxeo Aura Prophy

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)



### Set Proxeo Aura Perio

- › Aeropulidor
- › Cabezal de pulverización 120°
- › Cabezal de pulverización Perio
- › 40 puntas periodontales (subgingival)
- › Prophylaxis Powder SOFT (250 g)
- › Prophylaxis Powder SENSITIVE – Glycine Powder (160 g)



## Datos técnicos

<b>Aeropulidor</b>	CE 0297	
<b>Presión de funcionamiento del aire bar:</b>		2,2– 3,0
<b>Presión de funcionamiento del agua bar:</b>		1,0– 3,0
<b>Peso:</b>		155 g
<b>Dimensiones (an x pr x al):</b>		200x90x50 mm
<b>Condiciones ambientales:</b>		de +10 °C a +35 °C humedad relativa del aire de 30 % a 75 %
<b>Tipo/Conexión:</b>		PF-60/W&H Roto Quick, PF-60 M/KaVo Multiflex PF-60 N/NSK, PF-60 S/SIRONA
<b>Presión del aire P:</b>		800 hPa/1.060 hPa

### Cabezales de pulverización:

☒ Termodesinfectable

☒ Esterilizable hasta la temperatura indicada

### Puntas periodontales:

☒ No apto para reciclar

STERILE EO Esterilizados con óxido de etileno



### Sebastian Kritzinger

Jefe de producto de W&H, Bürmoos


«Proxeo Aura es sinónimo de pulido por aire eficiente. Con un sistema de aeropulidor y sus correspondientes polvos, puede eliminar el biofilm tanto supra como subgingival, así como decoloraciones, de forma eficaz, controlada y completa.»



### Babette McLaren

Higienista dental, Múnich

«El Proxeo Aura es fácil de usar, ergonómico y versátil. Perfecto para un pulido por aire eficaz, supra o subgingival.»

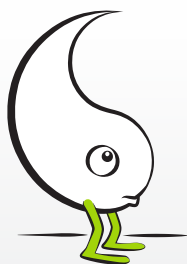

Implantology  
without **Periodontology** is  
like **Yin** without **Yang**.



**#NIWOP:** El flujo de trabajo sistemático y basado en la evidencia

#### W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
51111 Bürmoos, **Austria**  
t +43 6274 6236-0  
f +43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

#### W&H Ibérica

C/Canónigo Tárrega, 33  
46014 Valencia, **España**  
t +34 96 353 20 20  
f +34 96 353 25 79  
oficinas.es@wh.com  
wh.com